

BACTRYL SPRAY

Instructiuni de folosire

SOLUȚIE DE CURATARE ȘI DEZINFECTIE PENTRU SUPRAFEȚE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE INVAZIVE ȘI NEINVAZIVE

Descriere: Detergent și dezinfectant gata de utilizare, bactericid, virucid, levuricid, fungicid, microbactericid pentru suprafețe și dispozitive medicale invazive și neinvazive.

Compoziție: clorură de benzalconiu g <1 - Digluconat de clorhexidină g <1 - Isazone® g 0,001, coformulanți și apă purificată q.s. la 100 ml.

Proprietăți microbiologice: soluție de curățare și dezinfectie, gata de utilizare pentru suprafețe și dispozitive medicale într-un 1 minut (în conformitate cu EN14885 - dezinfectie pe suprafețe) și 30 de secunde prin frecare cu șervețel/laveta UN 16615).

BACTERICID, LEVURICID și VIRUCID (virusuri incapsulate): 1 minut. **FUNGICID** (cu acțiune mecanică) și **MICROBACTERICID** : 5 minute.

Mod de utilizare: se utilizează ca atare fără diluare. După ce ați îmbrăcat echipamentele de protecție personală (DPI) aplicați cu pulverizatorul soluția Bactryl pe suprafețe și pe dispozitive medicale și așteptați timpul de contact prevăzut. Alternativ, întindeți produsul uniform pe suprafață cu o laveta/șervețel și așteptați timpul prevăzut. Clătiți dispozitivele medicale înainte de utilizare dacă acest lucru este prevăzut.

Avertizări: Pericol. Produsul trebuie manipulat de personal calificat, cu standarde de siguranță adecvate, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare prevăzute și cu fișa de siguranță. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra într-un loc uscat la temperatura camerei, departe de sursele de căldură. Data expirării se referă la produsul intact, depozitat corespunzător. Nu utilizați după data de expirare

(H) Indicații de pericol: (H225): Lichid și vapori ușor inflamabili (H319). Provoacă iritații oculare severe (H412): Nociv pentru organismele acvatice cu efecte de lungă durată.

(P) Sfaturi de precauție: (P210): A se ține departe de sursele de căldură, de suprafețele fierbinți, de scântei, de flăcări de libere sau de alte surse de aprindere. Nu fumați (P280): Purtați mănuși de protecție și protejați-vă ochii/fața. (P305+P338): ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți bine timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. (P337+P313): Dacă iritația oculară persistă, consultați un medic. (P273): Nu aruncați în mediul înconjurător.

Conținut: 1000ml

Data revizuirii: 11/2019

Număr de urgență: +39.069145399

 **CANTEL**
 **CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.**
Via Laurentina, 169
00071 POMEZIA (RM) - Italia
Tel.: +39.06.9145399
Fax: +39.06.9146099
www.cantelmedical.it


0 0 5 1