

DETRO MATIC A – MANUAL DE UTILIZARE

- **PRODUS DE CURĂȚARE ALCALINĂ**
- **CONCENTRAT**

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI

- Compatibil cu toate tipurile de mașini de spălat instrumentar
- Compatibil cu toate gradele de duritate a apei
- Curățare și dezinfectare a instrumentarului termorezistent la **93 °C**
- Curățarea instrumentarului termolabil la **50–60 °C**
- Oferă protecție împotriva coroziunii
- Concentrație de utilizare redusă
- Eficiență ridicată

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru curățarea alcalină automată, în mașini de spălat, a instrumentarului medical realizat din **metal, sticlă, porțelan, plastic** și alte echipamente compatibile.

COMPOZIȚIE

Hidroxid de potasiu, agenți tensioactivi, polifosfați, silicați, agenți complexanți, inhibitori de coroziune

DOZARE

Se utilizează în concentrație de **0,1% – 0,2%**
(10–20 ml de produs la 10 litri de apă)

Concentrația poate fi crescută în funcție de gradul de contaminare.

ATENȚIONĂRI

- Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de folosire.
- Nu utilizați pentru curățarea mâinilor, feței sau a alimentelor.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Produs iritant.
- Evitați contactul cu pielea și mucoasele.
- În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra departe de lumina directă a soarelui.
- Recipientele trebuie închise etanș și depozitate într-un spațiu bine ventilat, la temperaturi între **0–30 °C**.

AMBALAJ

5 litri

DETRO HEALTHCARE KİMYA SANAYİ A.Ş.

 212 659 77 62  212 659 77 63

 info@detrox.com.tr – www.detrox.com.tr