



Lampă bactericidă UVC, putere 1*15W, pentru sterilizare, cu sau fără suport portabil. Manual de instrucțiuni

Lampa UVC este recomandată pentru spații mici cu o suprafață de sterilizare de până la 20mp.

- Prevăzută cu 1 tub generator de radiație UV-C (lungime de undă 253,7nm);
- Durata de viață a tuburilor UV - min 8000 ore;
- Tip montare - perete sau suport portabil;
- Alimentare: 220V / 50Hz, cablu de alimentare cu întrerupător on/off sau conectare la rețeaua existentă;
- Termen de garanție 12 luni.

TIMPUL DE STERILIZARE:

Suprafața:

- **0-20 mp**
- **30 mp**

Time de sterilizare:

- 15 min
- 45 min

APLICAȚII:

- Dezinfecția aerului și suprafețelor din încăperi cu încărcătura microbiană mare prin intermediul radiației UV (spitale, laboratoare de analize medicale, laboratoare de microbiologie, săli de operație, cabinete medicale individuale CMI, cabinete stomatologice, săli de așteptare, producția de medicamente, produse naturiste etc).

MICROORGANISME DISTRUSE: bacterii, viruși, spori de mucegai, drojdii, alge, protozoare etc.

MOD DE INSTALARE:

1. Îndepărtați corpul protector și tubul bactericid.
2. Conectați cablurile electrice la blocul terminal pentru conexiuni.
3. În interiorul cutiei veți găsi șuruburile corespunzătoare cu ajutorul cărora se realizează fixarea acestuia pe perete.
4. După montare puteți porni tensiunea de alimentare a instalației electrice.

ATENȚIE!!!

1. Înainte de a porni lampa asigurați-vă că în camera respectivă nu au rămas persoane, animale sau plante.
2. Lumina ultravioletă reflectată dintr-o oglindă de exemplu poate fi la fel de daunătoare pentru piele și ochi.

3. Nu lăsați aparatul nesupravegheat, la îndemâna copiilor sau a persoanelor lipsite de discernământ (cel mai bine, încuiați cu cheia camera în care acesta funcționează). Lumina ultravioleta UV-C directă este daunătoare pentru piele și mai ales pentru ochi, poate provoca arsuri grave.
4. Folosiți lumina ultravioleta UV-C doar pentru dezinfecția obiectelor.
5. Nu priviți direct la lampă în timpul utilizării.
6. Lucruri precum tablouri, pânze, fotografiile și în general obiecte care pot fi deteriorate de lumina soarelui, nu sunt, de asemenea, recomandate să fie expuse la lumina directă a lămpii UV-C.
7. Opriți lampa atunci când doriți să o curățați.
8. Dacă temperatura camerei este mai mică de 20°C sau mai mare de 40 °C, timpul de sterilizare trebuie extins.
9. După ce s-a încheiat ciclul de sterilizarea al încăperii nu intrați imediat, incinta trebuie aerisită minim 15-30 minute.
10. Nu lasați copiii în preajma dispozitivului.

Acest simbol indică faptul că produsul face obiectul unei colectări separate. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie colectate separat și nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie predate unui sistem de colectare, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE. Echipamentele electrice și electronice sunt periculoase pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, din cauza prezenței în compoziția lor a unor substanțe periculoase. Pentru informații suplimentare privind predarea și colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau centrele de colectare autorizate în acest sens.