

BACTICID



RO

Dezinfectant cu acțiune rapidă pe bază de alcool pentru dispozitive medicale

1 000 ml

LOT 01200418

2021/04

RO Dezinfectant cu acțiune rapidă pe bază de alcool pentru dispozitive medicale neinvazive și suprafețe rezistente la alcool.

Bacticidul are un spectru larg de activitate bactericidă (inclusiv stafilococ auriu), micobactericidă, virucidă (inclusiv Rota-, Adeno- și Noro-virusi), fungicidă și levuricidă.

MOD DE UTILIZARE: Bacticidul este gata pentru utilizare. Aplicați pe suprafață, urmăriți să fie acoperită toată suprafața. Suprafețele trebuie să fie vizibil umede pentru 30 de secunde pentru efect.

MICROORGANIZME	TIMPUL DE ACȚIONARE
Bacterii (inclusiv stafilococ auriu)	30 sec
Acțiune levuricidă: Candida albicans	30 sec
Micobacterii: (M. Avium, M. Terrae)	30 sec
Virusi: DVB, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno	30 sec
Virusi: Noro virus	15 sec

STANDARTE: EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

INGREDIENTE: 100 g de produs conțin ingrediente active: etanol 72g, Alchil (C12-18) dimetilbenzil amoniu clorid 0,0125g, Alchil (C12-14) etilbenzil-amoniu clorid 0,0125g

PERICOL. Flam. Liq. 2: H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili. P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P233: Păstrați recipientul închis etanș. P403+P235: A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. P501: A se elimina conținutul/recipientul conform legislației în vigoare referitoare la tratarea reziduurilor (HG 128/2002, OMAPM nr.756/2004, HG 349/2005, HG nr. 1061/2008, Legea 211/2011, HG 621/2005, HG 1872/2006)

AS Chemi-Pharm
Põltsu 132, Tallinn, 10917, Estonia, www.chemi-pharm.com
Importator în R. Moldova: "Eximotor" SA
Adresa: or. Chișinău, str. Albișoara 38A
tel: +37322407526



00 00 00 59