

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE

Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea face ca dispozitivul să fie inutilizabil și să anuleze orice garanție.

NUMERE CATALOG

C3278

LG1050

LG1090

Descriere

Ghid de lumină netransparent autoclavabil

Ghid de lumină transparent autoclavabil

Ghid de lumină de 90 grade autoclavabil

Descrierea dispozitivului

Ghidajele luminoase CONMED sunt ghidaje luminoase medicale reutilizabile, de înaltă transmisie care sunt utilizate în combinație cu orice sursă de lumină medicală din seria CONMED LS7700 și LS7600. Aceste ghidaje luminoase sunt furnizate nesterile și trebuie sterilizate înainte de utilizare. Consultați instrucțiunile de mai jos pentru curățare și sterilizare.

Pentru informații despre modul de conectare a ghidului de lumină la sursa de lumină consultați manualul de instrucțiuni pentru sursa de lumină din seria CONMED LS7700 și LS7600.

Utilizarea prevăzută

Acest dispozitiv este destinat să transmită lumină pentru iluminare din sursa de lumină către diferite instrumente, cum ar fi endoscoapele.

Contraindicații

Acest dispozitiv nu are nicio contraindicație despre care avem cunoștințe.

Avertismente și măsuri de precauție



Ghidajele luminoase CONMED sunt furnizate nesterile și trebuie sterilizate înainte de utilizare. Consultați instrucțiunile pentru curățare și sterilizare.

Ghidajele luminoase CONMED nu sunt destinate contactului cu pacientul.

Nu utilizați în proceduri chirurgicale care necesită iluminarea directă a ochiului. Puterea de intensitate ridicată a luminii de la ghidul de lumină sau de la endoscop poate provoca vătămări grave ale ochilor. Orientați întotdeauna ghidul de lumină sau endoscopul către podea atunci când nu îl utilizați.

RISC DE ARSURĂ și / sau INCENDIU: Folosirea ghidului de lumină poate cauza ca vârful aparatului să se încălzească ca rezultat al luminii de intensitate ridicată. Nu lăsați capătul care emite lumina al ghidului de lumină să intre în contact cu pacientul, cu draperiile chirurgicale sau cu orice alt material inflamabil (de exemplu, tifon etc.). Acest lucru poate aprinde draperia și ar putea cauza arsuri grave pacientului și / sau personalului din sala de operație.

Capătul distal al ghidului de lumină poate deveni fierbinte la atingere în timpul utilizării. Evitați contactul cu mâinile sau țesuturile și / sau reduceți luminozitatea sursei de lumină pentru a evita temperaturile ridicate în această zonă.

Nu utilizați ghidul de lumină cu echipamente sau accesorii incompatibile, care nu sunt autorizate de CONMED. Acest lucru poate duce la anularea certificărilor și / sau a garanțiilor.

Evenimente adverse

Nu avem cunoștințe despre evenimentele adverse produse de acest produs.