

Instrucțiuni de utilizare

ONESPRAY

Șervețele dezinfectante pe bază de alcool cu acțiune rapidă pentru dispozitive medicale

Produsul este utilizat pentru dezinfecția rapidă a dispozitivelor medicale neinvazive, incubatoarelor, aeratoarelor, utilizat în stomatologie și dispozitive medicale cu dezinfecție obligatorie utilizate în examenele ORL. Este gata de utilizare.

- Deconectați dispozitivele electrice înainte de aplicare.
- Extrageți un șervețel din container și ștergeți suprafața necesară de curățat și dezinfectat.
- Închideți capacul.
- După deschiderea ambalajului, folosiți șervețelele în maxim 21 zile.
- Nu folosiți șervețelul dacă este uscat.
- Nu folosiți pe suprafețe sensibile la alcool.
- Produsul este destinat pentru uz profesional.

