


Part no.	318-5010200-253
Product name	採血筆說明書/NO LOGO/羅馬尼亞文./Biolife/
Spec	L210*W97mm/模造紙/70P/雙面/黑/無處理/長邊對2折(完成尺寸L52.5*W97mm)
Designer	JF
Color	■ K:100 ■ K:60 ■ K:20

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA DISPOZITIVULUI DE ÎNȚEPARE ȘI A LANȚETELOR

Ver 2.0 2024/06

318-5010200-253

Dispozitivul de înțepare este utilizat cu lancete sterile de unică folosință compatibile, pentru a recolta ușor și practic fără durere sângele capilar din vârful degetului. Dispozitivul de înțepare este destinat utilizării doar pe un singur pacient.

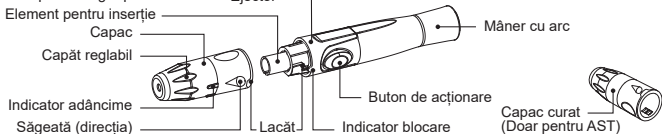

Dispozitivul de Înțepare vă oferă 6 adâncimi de penetrare a pielii:




Cu cât lungimea liniei indicatoare este mai lungă, cu atât va fi mai mare adâncimea de penetrare.

ATENȚIE

- ▶ Nu împărțiți niciodată lanțetele și dispozitivul de înțepare cu cineva.
- ▶ Utilizați întotdeauna o lanțetă sterilă. Lanțetele sunt de unică folosință.
- ▶ Evitați contaminarea lanțetelor și a dispozitivului cu cremă de mâini, uleiuri, murdărie sau resturi.
- ▶ Lanțetele folosite sunt de pericol biologic. Aruncați-le în conformitate cu reglementările locale.
- ▶ Nu reutilizați lanțetele. Utilizați întotdeauna o lanțetă nouă, sterilă pentru testare.


Setarea Dispozitivului de Înțepare

1

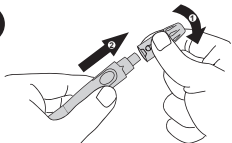


Răsuciți și scoateți capacul dispozitivului de înțepare.

3

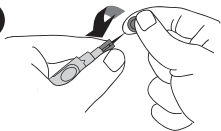


Răsuciți discul de protecție a lanțetei.

5

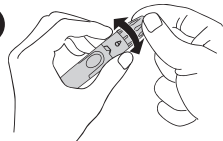


Răsuciți vârful reglabil al capacului în orice direcție, pentru a selecta adâncimea dorită pentru penetrare în conformitate cu cifrele indicate pe capac.

2

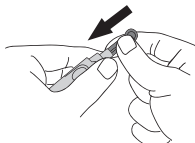


Introduceți lanțeta în elementul pentru inserție și împingeți ferm în jos până când este complet fixat.

4

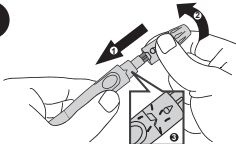

Puneți capacul și răsuciți-l pentru a închide lacătul precum în imagine, până veți auzi un click. Când dispozitivul este blocat corespunzător, indicatorul se va afla în poziție extremă dreaptă.

6

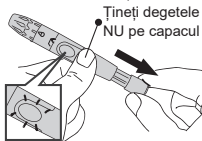

Țineți degetele pe dispozitiv, **NU** pe capacul acestuia.

Trageți de mânerul cu arc până veți auzi un clic. Culoarea butonului de acționare se va schimba dacă dispozitivul a fost încărcat corespunzător.

▶ **Dacă nu face click, este posibil ca dispozitivul să fi fost încărcat atunci când a fost introdusă lanțeta.**

NOTĂ

Înainte de a colecta picătura de sânge:

- ▶ Spălați-vă și uscați-vă mâinile.
- ▶ Selectați locul de puncție din vârful degetului.
- ▶ Masați locul de puncție timp de aproximativ 20 de secunde înainte de penetrare.
- ▶ Curățați locul de puncție folosind un tampon de bumbac umezit cu alcool 70% și lăsați să se.

7




Țineți ferm vârful dispozitivului de înțepare pe partea inferioară a vârfului degetului. Apăsăți butonul de acționare pentru a înțepa degetul. Se va auzi un clic, ce va indica faptul că înțepătura este completă.

8



Luați dispozitivul de la locul de puncție. După penetrare, îndepărtați prima picătură de sânge cu un tampon de bumbac curat. Strângeți ușor zona înțepată pentru a obține o altă picătură de sânge. Aveți grijă să **NU** mângâiați proba de sânge. Aplicați sângele pe banda de testare.

9

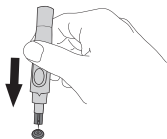


Scoateți lanțeta răsucind mai întâi capacul dispozitivului. Aruncați în siguranță lanțeta utilizată prin plasarea discului de protecție pe o suprafață dură și împingând vârful lanțetei în disc.

10



Glisați ejectorul înainte pentru a elimina lanțeta utilizată. Aruncați lanțetele în conformitate cu reglementările locale.

Locurile Alternative pentru Testare (AST)

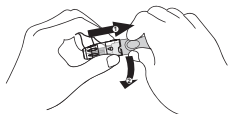

NOTĂ

- Această opțiune nu este disponibilă pentru toate dispozitivele. Consultați Ghidul Utilizatorului sistemului dvs. pentru a afla dacă puteți efectua AST (testarea în locuri alternative).
- Nu aruncați capacul după fiecare utilizare.

Testarea în locuri altele decât vârful degetului este numită testare în locuri alternative (AST). Vă rugăm să citiți secțiunea Locuri Alternative pentru Testare din Ghidul Utilizatorului înainte de a efectua AST.

Înlocuiți capacul dispozitivului de înțepare cu capacul curat pentru testarea în locuri alternative. Trageți înapoi de mânerul cu arc până se aude un click caracteristic.

Atunci când înțepați antebrațul, brațul superior sau mâna, evitați zonele cu vene evidente, în scopul de a preveni sângerarea în exces.

Curățarea și dezinfectarea dispozitivului de înțepare și a capacului

Lanțetele sunt destinate doar pentru o singură utilizare. Dispozitivul de înțepare este reutilizabil. Pentru a curăța dispozitivul de înțepare și capacul, utilizați un săpun și apă pentru a șterge și a curăța dispozitivul de înțepare. **NU** clătiți dispozitivul sub apă.

Dezinfectați capacul prin plasarea acestuia în alcool 70% timp de 10 minute și apoi lăsați-l să se usuce la aer. **NU** așezați dispozitivul într-o mașină de spălat vase sau nu utilizați detergenți.

ATENȚIE

1. În cazul în care rezultatul testului pentru sângele obținut de la locul de puncție nu se potrivește cu modul în care vă simțiți, contactați medicul specialist.
2. Înainte de a vă decide să utilizați sânge din alte locuri decât vârful degetului, consultați medicul specialist.
3. În cazul în care dispozitivul de înțepare este utilizat de o a doua persoană care oferă asistență de testare utilizatorului, dispozitivul de înțepare trebuie curățat și dezinfectat înainte de utilizare de către a doua persoană. A doua persoană trebuie să poarte mănuși de protecție pentru toate etapele atunci când oferă asistență pentru testare.
4. Păstrați întotdeauna dispozitivul de înțepare cu toate componentele sale și lanțetele departe de copii.
5. Folosiți doar modelul de lanțete TD-5084 pentru dispozitivul de înțepare TD-5010. Alte lanțete nu pot fi utilizate cu acest dispozitiv de înțepare.
6. Depozitați dispozitivul de înțepare neavând nici o lanțetă introdusă.
7. În cazul în care a avut loc un incident grav în legătură cu dispozitivul, acesta ar trebui raportat producătorului și autorității competente a statului în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Informații Simboluri

Semnificația Simbolului

	Consultați Instrucțiunile de utilizare
	Producător
	Numărul Lotului
	Marcajul CE pentru lanțete
	Nu reutilizați (doar lanțete)
	Valabil până la data de (doar lanțete)
	Sterilizat prin iradiere (doar lanțete)

Semnificația Simbolului

	Atenție
	Conformitate RoHS
	Dispozitiv medical
	Data producerii
	Marcajul CE pentru dispozitiv de înțepare
	Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană

EC REP

Reprezentant autorizat în UE
MedNet EC-REP GmbH
 Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany

Importator în România:
 BIOLIFE SYSTEMS SRL
 Str. Ion Solu 7 c.1
 Cristian, jud. Brașov, 507055
 www.clevercheck.ro
 mail: info@clevercheck.ro

Importator în Republica Moldova:
 POLISANO PRIM SRL
 Chisinau, str. N. Testemitanu 3/18,
 MD-2025, Republic of Moldova
 tel: 022.285.799; hotline 800.77.0.77
 email: office@polisanoprim.md
 DM000363186/DM000363187

TaiDoc Technology Corporation
 B1-7F, No.127, Wugong 2nd Rd.,
 Wugu Dist., 24888 New Taipei City, Taiwan
 www.taidoc.com

Model Nr. Lancete Sterile: TD-5084
Model Nr. Dispozitiv Înțepare: TD-5010

STERILE R



MD

0123