



MEDISEPT
Perfect disinfection

Importator și reprezentant autorizat

în REPUBLICA MOLDOVA:

S.A. "M-INTER-FARMA", Mun. Chișinău, str.

Grenoble 23,21

Tel. (022) 904-006, 904-005, Fax: (022) 904-007,

079768549, 068773434 www.minterfarma.md,

e-mail: sales@minterfarma.md

Număr de înregistrare de stat a

dispozitivelor medicale Nr.

DM000239315, DM000239316



Velox® Spray

Spay pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor

Lichid pe bază de alcool pentru dezinfectarea rapidă a suprafețelor mici în domeniul medical, aziluri, sanatorii, în centre SPA și fitness, frizerii, saloane de frumusețe și masaj, grădinițe și școli. Produsul este potrivit și pentru suprafețele care au sau nu contact cu produsele alimentare.

Caracteristicile produsului:

- Pentru dezinfectarea suprafețelor mici al echipamentului medical: paturilor și fotoliilor medicale, a echipamentului medical și chirurgical, echipamentului de reabilitare.
- Destinat pentru toate suprafețele non-medicale ex. în gastronomie, frizerii și suprafețe care vin în contact cu produsele alimentare.
- Activ deja în 15 sec. contra Fungilor și în 30 sec. contra Bacteriilor, TBC și virusurilor (incl. Rota, Noro).
- Nu lasă pete sau dungi.
- Recomandat pentru suprafețe lucioase și din sticlă.

Beneficiile utilizatorului:

- Eficacitate garantată și siguranța utilizării.
- Reducerea înaltă a riscului de infecție.
- Efect rapid asupra suprafeței curățate și dezinfectate.
- Poate fi utilizat pe multe tipuri de materiale.



**Dispozitive
medicale
neinvasive**



**Instrumentele
pentru frizerii
și cosmetologii**



**Aromă
plăcută de
ceai tonic**



**Poate fi și
miros
neutru**

Velox® Spray

Aplicarea:

Lichid pe bază de alcool pentru dezinfectarea rapidă a suprafețelor mici în domeniul medical, aziluri, sanatorii, în centre SPA și fitness, frizerii, saloane de frumusețe și masaj, grădinițe și școli. Produsul este potrivit și pentru suprafețele care au sau nu contact cu produsele alimentare. Poate fi utilizat pentru dezinfectarea suprafețelor, cum ar fi mesele, mânerurile, pentru echipament și accesorii în frizerii și cosmetologii. Produsul de asemenea este recomandat pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale neinvazive, cum ar fi fotoliile de tratament și echipamentul medical. Velox Spray posedă activitate contra bacteriilor, levurilor, contra tuberculozei acțiune virucidă limitată (contra Rotavirus, Norovirus) și contra virusurilor încapsulate (incl. Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV).

Eficacitatea	EN 14885	Condiții	
		curat	murdar
Bacteria (including MRSA)	EN 13727	30 sec.	30 sec.
	EN 16615	30 sec.	30 sec.
Fungi (C. albicans)	EN 13624	15 sec.	15 sec.
	EN 16615	30 sec.	30 sec.
Mycobacteria tuberculosis (M. terrae)	EN 14348	30 sec.	30 sec.
Enveloped viruses (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Ebola)	EN 14476	30 sec.	60 sec.
BVDV	EN 14476	30 sec.	30 sec.
Rota virus	EN 14476	30 sec.	60 sec.
Noro virus	EN 14476	30 sec.	30 sec.

Instrucțiuni de utilizare:

Pulverizați suprafața de la o distanță de aprox. 30 cm, asigurându-ne ca toată suprafața este acoperită. Se lasă pentru 30 sec. În cazul în care suprafețele dezinfectate vin în contact cu produsele alimentare, se clătesc cu apă potabilă. Alte tipuri de suprafețe nu necesită după dezinfectare spălare cu apă. A nu folosi pe suprafețe sensibile la alcool (ex. sticlă acrilică). Doar pentru uz profesional.

Compoziție: substanțe active în 100 gr. produs: 63.7 gr. etanol, 6.3 gr. propan-2-ol

Unități de ambalare:

500 ml flacon spray,
1 L flacon spray,
5 L canistră.



Dispozitiv medical clasa II în conformitate cu Legea Dispozitivelor Medicale. Destinat pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale neinvazive.

Numărul permisiunii pentru produse biodistructive în Polonia: 7675/19

Fișa cu date de securitate și fișa componentelor valabile pe www.medisep.pl

CE 2274