
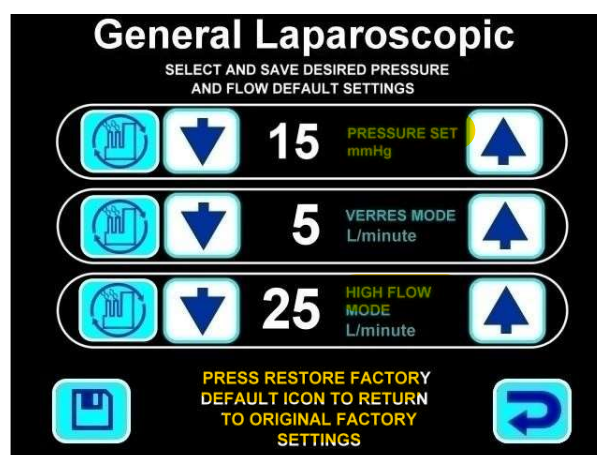


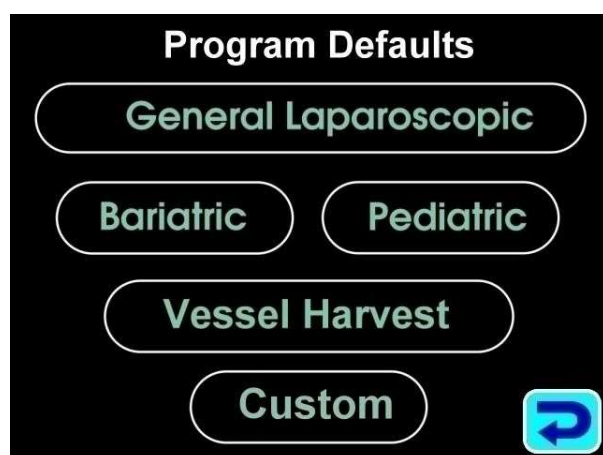

Mod de operare	Valori prestabilite din fabrică	Intervale selectabile	Intervalele de operare recomandate clinic
Laparoscopic general	Presiune: 15 mmHg Debit Verres: 5 L/minut Debit ridicat: 25 L/minut	Presiune: 5-30 mmHg Debit Verres: 1-5 L/minut Debit: 1-45 L/minut	Presiune: 12-15 mmHg Debit Verres: 1-5 L/minut Debit ridicat: 1-25 L/minut
Bariatric	Presiune: 15 mmHg Debit Verres: 5 L/minut Debit ridicat: 30 5 L/minut	Presiune: 5-30 mmHg Debit Verres: 1-5 L/minut Debit: 1-50 L/minut	Presiune: 12-15 mmHg Debit Verres: 1-5 L/minut Debit ridicat: 1-30 L/minut
Pediatric 1-6 kg 7-12 kg 13-20 kg 21-24 kg >24 kg	Consultați pagina 30		
Recoltarea din vase	Presiune: 6 mmHg Debit: 1 L/minut	Presiune: 1-20 mmHg Debit: 1.0 până la 5 până la 10 L/minut	Presiune: 1-12 mmHg Debit: 1.0 - 4 L/minut
Personalizat	Presiune: 15 mmHg Debit Verres: 5 L/minut Debit ridicat: 25 L/minut	Presiune: 5-30 mmHg Debit Verres: 1-5 L/minut Debit: 1-50 L/minut	Presiune: 12-15 mmHg Debit Verres: 1-5 L/minut Debit ridicat: 1-25 L/minut

Notă: Avertismente și atenționări specifice pot fi găsite începând din Secțiunea 5 a acestui manual

Notă:

Toate setările implicite pot fi ajustate în întregul interval admisibil pentru fiecare mod de operare. Pentru o înțelegere completă a intervalelor selectabile, vă rugăm să consultați informațiile prezentate mai sus.

Săgețile **sus** și **jos** pot fi utilizate pentru a depăși setările implicite în ecranul Modulii de operare. Când sunt utilizate, săgețile **sus** și **jos** vor permite utilizatorului să parcurgă întreaga gamă de setări permise pentru modul de operare specific. Când utilizați o setare deasupra sau sub limita de funcționare recomandată clinic, valoarea numerică va fi afișată în „Cyan”. Dacă utilizatorul se află în limită, afișările numerice vor fi afișate în „Alb”. Când utilizați săgețile **sus** și **jos** pentru a trece peste valorile implicite, funcția de deflare automată cu repetarea tastelor va fi dezactivată peste limita implicită. Utilizatorul va trebui să apese în mod repetat butoanele săgeată pentru fiecare creștere a valorii numerice.