

Baterie cu litiu mare Hall®

Nr. de catalog	Descriere
L3000LG	Baterie cu litiu mare Hall®

DESCRIERE

Bateria cu litiu mare Hall® reîncărcabilă (L3000LG) se utilizează pentru alimentarea tuturor pieselor de mână cu baterie Hall aprobate, exceptând PowerPro.

Această baterie se încarcă utilizând încărcătorul de baterii cu litiu Hall (L3000). Pentru informații mai detaliate despre încărcătorul de baterii, consultați manualul încărcătorului de baterii cu litiu Hall (L3000).

Bateriile se livrează nesterile și încărcate parțial. Întotdeauna curățați, încărcați și sterilizați acumulatorii înainte de utilizare.

**UTILIZARE DESTINATĂ**

Bateria cu litiu mare Hall reîncărcabilă (L3000LG) este destinată alimentării tuturor pieselor de mână cu baterie Hall aprobate, exceptând PowerPro.

AVERTIZĂRI

1. Acest echipament este destinat utilizării de către cadrele medicale care s-au familiarizat cu instrucțiunile de utilizare. Înainte de utilizare, citiți și urmați toate avertizările, precauțiile și instrucțiunile marcate pe produs și incluse în acest manual. 
2. Nu scurtcircuitați terminalele bateriei și nu permiteți intrarea în contact a acestora cu obiecte metalice. Acest lucru poate duce la electrocutări sau arsuri la nivelul corpului, precum și la defectarea bateriei. 
3. Înainte de utilizare, inspectați pentru eventuale deteriorări (de exemplu, crăpături în carcasa bateriei, coroziune la nivelul contactelor etc.). Nu utilizați baterii deteriorate. Dacă bateria este deteriorată și observați scurgeri sau reziduuri, nu permiteți intrarea acesteia în contact cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Există riscul de arsuri. În caz de contact, spălați zona cu cantități mari de apă și solicitați imediat un consult medical. Eliminarea sau reciclarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările locale, naționale și guvernamentale. 
4. În cazul utilizării incorecte, acumulatorul utilizat în acest dispozitiv poate prezenta risc de incendiu sau arsuri chimice. Nu dezamblați produsul, nu îl încălziți la temperaturi de peste 278°F (137°C) și nu îl incinerati. Înlocuiți bateria numai cu baterii cu litiu Hall aprobate. Utilizarea altei baterii poate prezenta risc de incendiu sau explozie.

PRECAUȚII

1. Încărcați această baterie folosind numai încărcătorul de baterii cu litiu Hall (L3000). Utilizarea unor încărcătoare neaprobate poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea bateriei. 
2. Eliminați imediat bateria uzată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se dezambla și a nu se elimina în foc. Acești acumulatori conțin litiu-fier-fosfat, care trebuie reciclat sau eliminat în mod adecvat. Este interzisă eliminarea bateriilor cu litiu-fier-fosfat ca deșeuri menajere. Eliminarea sau reciclarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările locale, naționale și guvernamentale. În SUA sunați la 1-866-426-6633 pentru informații suplimentare referitoare la eliminarea sau reciclarea bateriilor. În afara SUA, contactați reprezentanța locală a CONMED. 
3. Dacă acumulatorul atașat la o piesă de mână cât timp aceasta nu este utilizată sau este depozitată, bateria se va descărca.
4. Nu scăpați bateria deoarece aceasta se poate defecta, creând o situație potențial nesigură.
5. Nu scufundați bateria în lichide sau soluții. Poate apărea coroziunea de contact, care duce la reducerea performanței bateriei și/sau a piesei de mână. 
6. Nu curățați bateria cu înălbitor, cu detergenți pe bază de clor sau soluții caustice care conțin fenoli. Poate apărea coroziunea de contact, care duce la reducerea performanței bateriei și/sau a piesei de mână.
7. Nu expuneți acumulatorul la foc sau la incinerare; acest lucru poate cauza ruperea bateriei, creându-se o potențială stare nesigură.
8. Acumulatorul trebuie să fie complet descărcat atunci o returnați producătorului.
9. Bateriile cu litiu-fier-fosfat pierd aproximativ 3% din încărcare lunar în timpul depozitării la temperatura nominală a camerei. Se recomandă ca bateriile să fie depozitate pe încărcător atunci când nu sunt utilizate, pentru a asigura încărcarea completă.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Curățați întotdeauna acumulatorii înainte de încărcare. Consultați informațiile privind „Curățarea” din secțiunea „INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE ȘI STERILIZARE”.