

Quality Control Data sheet & Instructions for Use  
*Fiche de Contrôle Qualité et Conditions d'Utilisation*

Haemolytic serum / Sérum hémolytique

Product code / Code Produit: HS  
Batch / N° de lot: 008  
Date of manufacture / Date de fabrication: 2022/02  
Expiry date / Date d'expiration: 2025/02

**Kit components / Composition du kit**

Bottle / Flacon		Batch / Lot	Expiry date/Date exp.
Product Code	HS	008	2025/02
		Expiry date/Date exp.	2025/02

**Description:**

Haemolytic serum obtained from a pool of rabbit sera sensitized against sheep red blood cells.  
*Sérum hémolytique obtenu à partir d'un mélange de sérums de lapins ayant été sensibilisés aux hématies de mouton.*  
For use in the Complement Fixation Test for the diagnosis of various veterinary diseases.  
*Pour la réalisation du Test de Fixation du Complément pour le diagnostic de diverses maladies animales.*  
Obtained under aseptic conditions and managed in a biological safety cabinet.  
*Obtenu dans des conditions aseptiques et manipulé sous hotte de sécurité biologique.*

**Storage / Conservation:**

- Upon receipt, store between +2°C and +8°C.  
*Conservation entre +2°C et +8°C après réception.*

**Precaution for use / Précautions d'emploi :**

- Use personal protective equipment in accordance with local regulations (protective lab coat, one way gloves, and eventually eye protection)  
*Utiliser des équipements de protection individuelle conformément aux réglementations locales en vigueur (gants à usage unique, blouse de laboratoire, et éventuellement protection oculaire).*
- For *in vitro* use only / *Pour usage in vitro uniquement.*

**Waste disposal / Elimination des déchets**

- All waste should be properly decontaminated prior to disposal. Dispose in accordance with local regulations.  
*Tous les réactifs doivent être décontaminés avant élimination. Éliminer les produits conformément aux réglementations locales en vigueur.*
- It is the responsibility of each laboratory to handle wastes and residues produced according to their type and degree of danger.  
*Il est de la responsabilité de chaque laboratoire pour traiter les déchets et résidus produits par type et degré de danger.*

**Shelf life / Durée de conservation:**

- The reagent is stable up to the expiration date indicated on the package label, if stored under recommended conditions. *Le réactif est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette de l'emballage, s'il est conservé dans les conditions recommandées.*
- Do not use after the expiration date. *Ne pas utiliser après la date d'expiration.*

**Quality Control / Contrôle de qualité:**

Hemolytic activity : CONFORM.  
*Activité hémolytique CONFORME.*

**Use / Utilisation:****EN**

- 1- Ready-to-use serum. **Do not reconstitute with water.**
- 2- Titrate, in accordance with the normalized laboratory protocols. In our working conditions, the titration is performed with a solution of sheep red blood cells at 2.5%

**FR**

- 1- *Sérum prêt à l'emploi. Ne pas reconstituer avec de l'eau.*
- 2- *Titrer selon les protocoles de laboratoire normalisés. Dans nos conditions de travail, la titration est réalisée avec une solution de globules rouges de moutons à 2,5%.*

Method / Méthode	Dilutions to test - Zone de dilution à tester
Complement Fixation Test / <i>Réaction de Fixation du Complément.</i>	Indicating titer (working dilution) of 1/1000. Obtained in our working conditions and according to the protocol established by the French standard NF U47-004. <i>Titre indicatif (dilution de travail) de 1/1000. Obtenu dans nos conditions de travail et selon le protocole fixé par la norme française NF U47-004.</i>



Quality Control Manager : Anaïs Agnel  
*Responsable Contrôle Qualité*  
[anaïs.agnel@innovative-diagnostics.com](mailto:anaïs.agnel@innovative-diagnostics.com)



Director : Philippe Pourquier  
*Directeur*  
[philippe.pourquier@innovative-diagnostics.com](mailto:philippe.pourquier@innovative-diagnostics.com)

Quality Control Data sheet & Instructions for Use  
*Fiche de Contrôle Qualité et Conditions d'Utilisation*

Haemolytic serum / Sérum hémolytique

Product code / Code Produit: HS  
Batch / N° de lot: 008  
Date of manufacture / Date de fabrication: 2022/02  
Expiry date / Date d'expiration: 2025/02

**Kit components / Composition du kit**

		Batch / Lot	Expiry date/Date exp.
Bottle / Flacon		HS-008	2025/02
Product Code	HS	Batch / Lot	008
		Expiry date/Date exp.	2025/02

**Description:**

Haemolytic serum obtained from a pool of rabbit sera sensitized against sheep red blood cells.  
*Sérum hémolytique obtenu à partir d'un mélange de sérums de lapins ayant été sensibilisés aux hématies de mouton.*  
For use in the Complement Fixation Test for the diagnosis of various veterinary diseases.  
*Pour la réalisation du Test de Fixation du Complément pour le diagnostic de diverses maladies animales.*  
Obtained under aseptic conditions and managed in a biological safety cabinet.  
*Obtenu dans des conditions aseptiques et manipulé sous hotte de sécurité biologique.*

**Storage / Conservation:**

- Upon receipt, store between +2°C and +8°C.  
*Conservation entre +2°C et +8°C après réception.*

**Precaution for use / Précautions d'emploi :**

- Use personal protective equipment in accordance with local regulations (protective lab coat, one way gloves, and eventually eye protection)  
*Utiliser des équipements de protection individuelle conformément aux réglementations locales en vigueur (gants à usage unique, blouse de laboratoire, et éventuellement protection oculaire).*
- For *in vitro* use only / *Pour usage in vitro uniquement.*

**Waste disposal / Elimination des déchets**

- All waste should be properly decontaminated prior to disposal. Dispose in accordance with local regulations.  
*Tous les réactifs doivent être décontaminés avant élimination. Éliminer les produits conformément aux réglementations locales en vigueur.*
- It is the responsibility of each laboratory to handle wastes and residues produced according to their type and degree of danger.

**life / Durée de conservation:**

- The reagent is stable up to the expiration date indicated on the package label, if stored under recommended conditions. *Le réactif est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette de l'emballage, s'il est conservé dans les conditions recommandées.*
- Do not use after the expiration date. *Ne pas utiliser après la date d'expiration.*

**Quality Control / Contrôle de qualité:**

Hemolytic activity : CONFORM.  
*Activité hémolytique CONFORME.*

**Use / Utilisation:**

**EN**

- 3- Ready-to-use serum. **Do not reconstitute with water.**
- 4- Titrate, in accordance with the normalized laboratory protocols. In our working conditions, the titration is performed with a solution of sheep red blood cells at 2.5%

**FR**

- 3- *Sérum prêt à l'emploi. **Ne pas reconstituer avec de l'eau.***
- 4- *Titre selon les protocoles de laboratoire normalisés. Dans nos conditions de travail, la titration est réalisée avec une solution de globules rouges de moutons à 2,5%.*

Method / Méthode	Dilutions to test - Zone de dilution à tester
Complement Fixation Test / <i>Réaction de Fixation du Complément.</i>	Indicating titer (working dilution) of 1/1000. Obtained in our working conditions and according to the protocol established by the French standard NF U47-004. <i>Titre indicatif (dilution de travail) de 1/1000. Obtenu dans nos conditions de travail et selon le protocole fixé par la norme française NF U47-004.</i>



Quality Control Manager : Anais Agnel  
*Responsable Contrôle Qualité*  
[anais.agnel@innovative-diagnostics.com](mailto:anais.agnel@innovative-diagnostics.com)



Director : Philippe Pourquier  
*Directeur*  
[philippe.pourquier@innovative-diagnostics.com](mailto:philippe.pourquier@innovative-diagnostics.com)