


5. Volume (Volum) – pentru ajustarea volumului sunetului
6. Brightness (Luminozitate) – pentru reglarea luminozității de fundal a ecranului
7. Import (Importare) – se pot importa valori System Settings (Setări sistem) și/sau Surgeon Presets (Presetări chirurg) de la alte unități
8. Export (Exportare) – se pot exporta valori System Settings (Setări sistem) și/sau Surgeon Presets (Presetări chirurg) pentru utilizare pe alte dispozitive. Pot fi exportate simultan mai multe profiluri. Atingeți toate profilurile de chirurg dorite (pătratele verzi indică profilurile selectate).

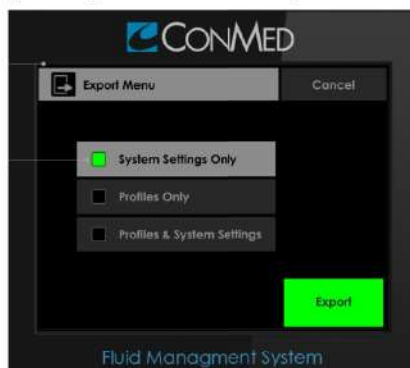

4.2.2 Surgeon Presets (Presetări chirurg)

După selectarea opțiunii New (Nou), Duplicate (Duplicare) sau Edit (Editare) pentru chirurg, tipul de procedură poate fi selectat pe afișaj pentru proceduri chirurgicale Knee (Genunchi), Shoulder (Umăr), Small Joint (Articulație mică) și Hip (Șold).

NOTĂ: Când nu este selectat niciun chirurg, pictograma din partea de sus va apărea cu textul New (Nou). Pictograma va apărea cu textul Duplicate (Duplicare) atunci când este evidențiat un profil de chirurg existent.

Atingeți lung și trageți bara glisantă în sus sau în jos pe afișaj pentru a vizualiza alți chirurghi disponibili din listă. Intrările sunt mai întâi după procedură și apoi în ordine alfabetică după numele chirurgului.

