



Figura 4.

COMUTATOR PODAL / DISPOZITIV ACTIVATOR AUTOMAT EZLINK

Evacuatorul de fum chirurgical VisiClear™ este echipat, de asemenea, cu un comutator podal pneumatic. Un comutator podal sau un dispozitiv activator automat EZLink poate fi adăugat la orice sistem foarte simplu, prin conectarea unui accesoriu de activare BUFFALO FILTER® la mufa corespunzătoare situată pe panoul frontal (în cazul comutatorului podal) sau panoul din spate (în cazul EZLink) al unității. Atunci când este conectat un comutator podal, unitatea poate fi pornită sau oprită prin apăsarea comutatorului podal, o dată pentru fiecare operație. Pentru indicații privind utilizarea dispozitivului activator automat EZLink, vă rugăm să consultați instrucțiunile care însoțesc produsul respectiv.

INDICATORUL DURATEI DE VIAȚĂ A FILTRULUI

Indicatorul duratei de viață a filtrului de pe panoul de comandă de tip ecran tactil oferă o indicație vizuală a situației privind durata de viață a filtrului în curs de utilizare. Indicatorul duratei de viață a filtrului pentru evacuatorul de fum chirurgical VisiClear™ se va ajusta automat în funcție de setarea selectată privind modul.

ATENȚIE: Durata de viață a filtrului și tehnologia RFID este doar un indicator al timpului, nu un indicator al performanței filtrului.

Modul „Laparoscopic” = 35 ore de durată de viață a filtrului

Modul „Electrochirurgical/Diatermie” = 21 ore de durată de viață a filtrului

Modul „Tub deschis” = 18 ore de durată de viață a filtrului

Indicatorul duratei de viață a filtrului VisiClear™ este setat din fabrică. Toate temporizările duratei de viață a filtrului sunt automate. A se vedea Figura 5.