

Avantajele Ventilatorului V3:

COVID-19 Managementul respirator pentru pneumonia cu coronavirus:

- $200\text{mmHg} \leq P/F < 300\text{mmHg}$ → HFNC → Debit $40 \sim 50\text{L} / \text{min}$. FiO_2 100%, observați timp de 2h
- $150\text{mmHg} \leq P/F < 200\text{mmHg}$ → NIV → IPAP $8 \sim 12\text{cmH}_2\text{O}$, EPAP. $5 \sim 8\text{cmH}_2\text{O}$, FiO_2 100%, observați timp de 2h
- $P/F < 150\text{mmHg}$ → Intubație traheală ventilație invazivă → V_t 6ml/kg(IBM) , PEEP. $8 \sim 10\text{cmH}_2\text{O}$, RR 20 times/min, FiO_2 100%.

Interfața este simplă și intuitivă.

Moduri de ventilație de gamă vastă, care acoperă terapia respiratorie critică și subcritică pentru pacienții adulți / copii.

Cu **moduri de ventilație extinse și tehnologii de sincronizare inteligente** V3 oferă o gamă întreagă de tratament: terapie cu O_2 -monitorizare etc.

Ventilatorul V3 suportă pe deplin diferitele nevoi de tratament ale ICU, PACU, RICU, EICU, PICU și alte secții.

Supape duble pentru inhalare și expirație. Ambele supape **pot fi demontate pentru o curățare mai aprofundată. Demontare rapidă fără scule. Supapele suportă sterilizare la temperatură înaltă de 134°C și la presiune înaltă.**

*** Conform celor mai recente **standarde CE**, supapele de inhalare și expirație **trebuie să fie detașabile și autoclavabile** pentru a reduce riscul infecțiilor spitalicești.

Turbina de înaltă performanță asigură o ventilație de **debit mare de până la $210\text{L} / \text{min}$** pentru a satisface nevoile de terapie respiratorie pentru pacienții în stare critică. Cu o **durată de viață a turbinei de până la 20 000 de ore**, nu este necesară întreținere sau înlocuire pe termen scurt.

Ecranul Ventilatorului V3 poate fi inclinat la cel mai bun unghi de vizualizare până la 30 de grade pentru comoditatea personalului medical.

Tehnologie IntelliSynTec: Reglare automata a triggerului expirator la valoarea optimă bazată pe caracteristicile plămânilor pacientului, ceea ce face respirația mai confortabilă pentru pacienți și reduce ajustările frecvente ale setărilor ventilatorului în timpul tratamentului. Acest lucru reduce în mod eficient volumul de muncă al personalului medical, asigurând în același timp o sincronizare mai bună.

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MedPunkt SRL, mun.Chisinau, str.N.Testemiteanu 11-59