


PC

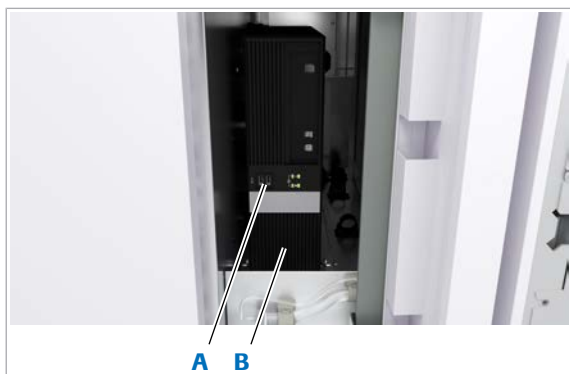

A Port USB

B PC

PC-ul rulează software-ul care controlează instrumentul. O bază de date gestionează înregistrările probelor, datele de calibrare și QC, precum și parametrii de sistem și rezultatele.

PC-ul are o unitate DVD-RAM și două porturi USB accesibile prin ușa frontală a unității de alimentare a probelor. Introduceți un DVD-RAM sau conectați un stick USB pentru a realiza o copie de rezervă a înregistrărilor probe sau pentru a realiza o copie de rezervă și a restaura configurația sistemului.

Printer

Imprimanta imprimă rezultatele și rapoartele din software. Utilizarea unei imprimante este opțională.



Instalarea și conectarea imprimantei pot fi efectuate doar de către un reprezentant de Service & Customer Support Roche.

📄 **Subiecte asociate**

- Despre sistem (73)