


Conectorii testului: acestia sunt introduși cu fața în sus în portul de test

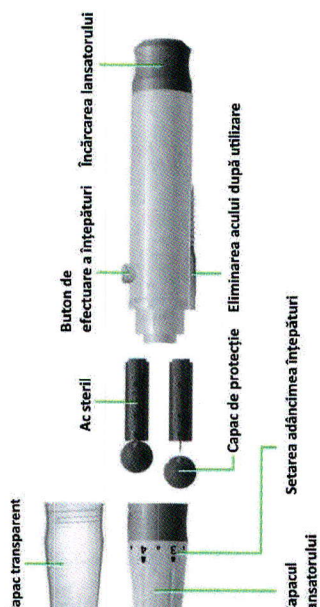


Reprezentant local în Republica Moldova
„PHARMONY” SRL
 Asistență tehnică, vânzare consumabile (teste, ace)
 Tel: (022) 944-958
 mail: info@pharmacy.md
 e-

▲ Pregătirea dispozitivului de înțepare


Important:

Înainte de a efectua testul dezinfectați lansatorul cu un tampon îmbibat cu alcool sau soluție apă și săpun.

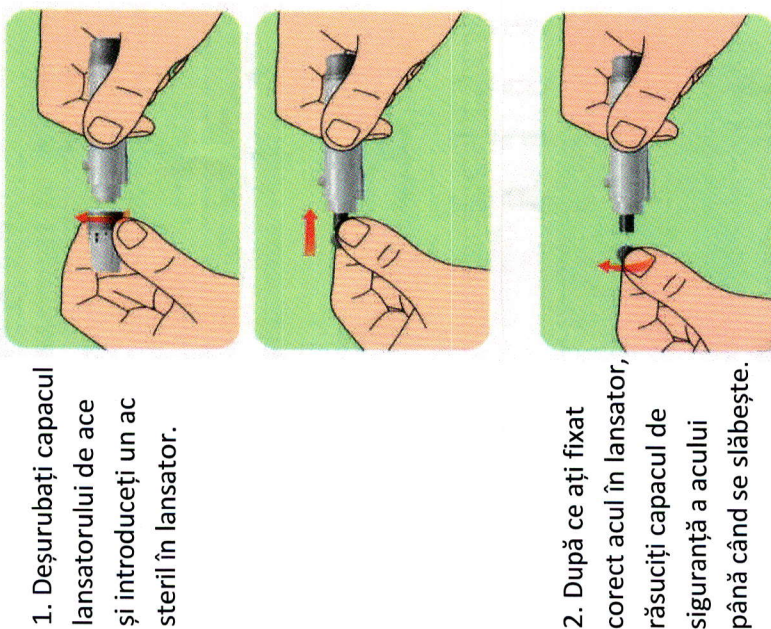

1. Deșurubați capul lansatorului de ace și introduceți un ac steril în lansator.

2. După ce ați fixat corect acul în lansator, răsușiți capul de siguranță a acului până când se slăbește.

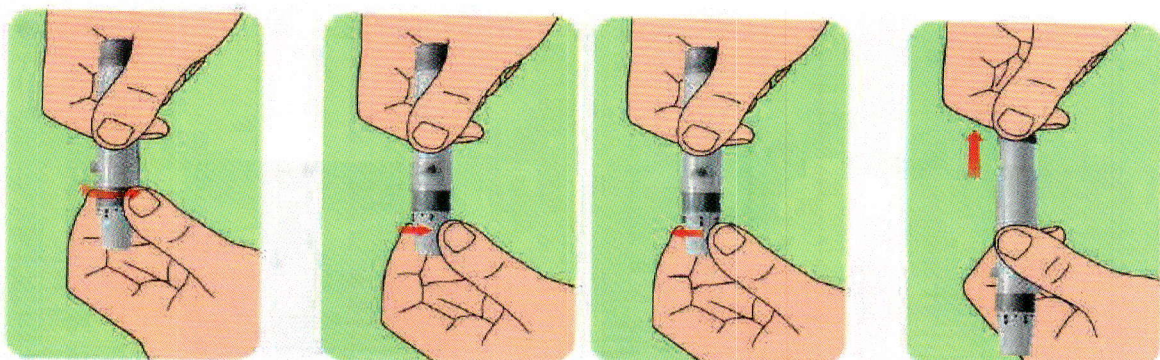

3. Înșurubați capul de siguranță înapoi pe lansatorul de ace.

4. Reglați adâncimea puncției prin rotirea capacului la una din cele 5 poziții setate.


5. Trageți cilindrul înapoi pentru a încărca lansatorul de ace.




Efectuarea unui test de măsurare a glicemiei.

1. Extrageți un test din flaconul cu teste apoi închideți ermetic capacul flaconului, după ce ați extras testul.

2. Se introduce banda de test în glucometru după cum indică săgeata. Glucometru pornește automat.

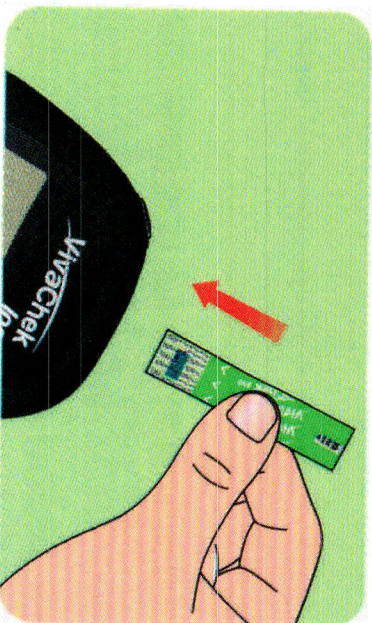


4. Fixați lansatorul de ace cu capacul de protecție pe partea laterală a degetului. Apăsăți butonul de lansare a acului. În urma acestor acțiuni obțineți o înțepătură.

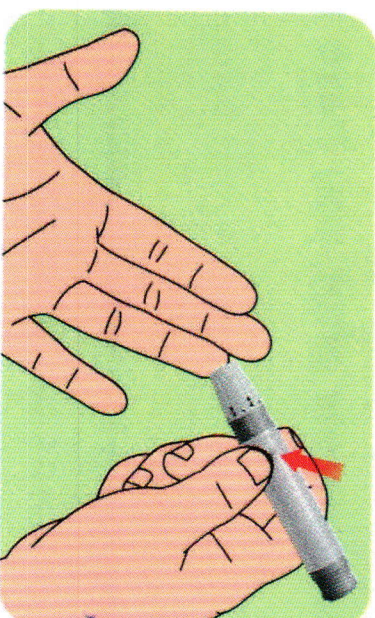

5. Atingeți cu partea frontală a testului picătura de sânge, absorpția lui se va produce automat.

Atenție nu aplicați picătura de sânge pe partea de sus a benzii de testare.

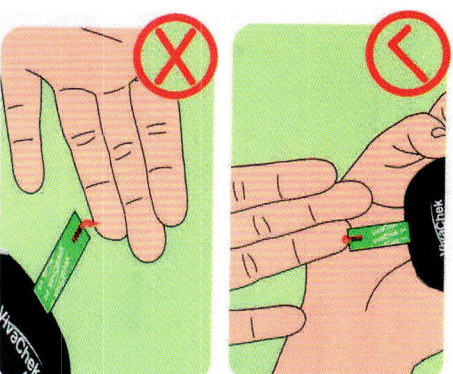

6. Dispozitivul va efectua măsurarea în următoarele 5 secunde și va afișa rezultatul pe ecran. Rezultatul testului va fi memorat în memoria internă a dispozitivului. (capacitatea memoriei este de 900 teste)

3. Pe ecran va apărea imaginea benzii de test și o picătură ce licărește, aceasta indică că dispozitivul este gata pentru efectuarea măsurării. În caz că nu apare verificați corectitudinea plasării testului.

