



**Societatea pe Acțiuni
“TEHOPTIMED”**

C/F 1003600087162

MD-2044, or. Chișinău

str. Maria Dragan, 19 “A”

tel: (373-22) - 47-12-15, 47-37-69.

e-mail: info@tehoptimed.md / tehoptimed@inbox.ru

web: www.tehoptimed.md

REGULI DE ASAMBLARE ȘI EXPLOATARE

A DULAPURILOR PENTRU MEDICAMENTE SERIA MD

ASAMBLAREA

1. Întreprinderea care efectuează asamblarea și exploatarea dulapurilor trebuie să desemneze persoanele responsabile pentru efectuarea lucrărilor de asamblare a dulapurilor și pentru exploatarea ulterioară a acestora în conformitate cu cerințele instrucțiunii producătorului și cu prezentele Regulii.

2. Asamblarea dulapurilor trebuie executată în strictă conformitate cu instrucțiunea, într-o încăpere cu suprafață suficientă (cel puțin 3 m x 3 m), neaglomerată cu obiecte străine, iluminată suficient și cu podele netede. Notă: Este de dorit să se folosească platforme cu o suprafață care se depășească peretele din spate al dulapurilor.

3. Așezarea pieselor de completare pentru asamblare, deplasarea pieselor, amplasarea și utilizarea instrumentelor etc. trebuie să excludă riscul de deteriorare a pieselor ca urmare a căderii acestora, ajungerii sub picioarele asamblatorilor și a persoanelor străine, sau ca rezultat al atingerii lor de instrumente, suprafețele pardoselii, pereți, alte construcții înconjurătoare (trebuie folosite garnituri din carton gofrat de la ambalajul dulapurilor).

4. Piese de completare mici în timpul asamblării trebuie să se afle într-o cutie mică, pentru a exclude pierderea acestora.

5. Înainte de a începe asamblarea fixați soclurile pentru picioare la baza dulapului (încă nu instalați picioare în acest pas). **Nu strângeți șuruburile excesiv !!!**

6. **Vă recomandăm să folosiți platforme cu o suprafață care depășește suprafața peretelui din spate al dulapului. De exemplu: asamblarea bazei și pereților dulapului poate fi făcută pe cutiile-ambalaj ale dulapurilor pline sau goale (4-8 buc.) (puse una pe alta)**

7. **La asamblarea ramei în formă de "II" nu strângeți excesiv șuruburile autofiletante !!!**

8. Înainte de a instala peretele lateral drept al dulapului MD, instalați în primul rând fixator de teu și cărligul-cuier pe locurile respective, pentru că după instalarea peretelui lateral drept v-a fi mai dificil.

9. **Instalați capacul împreună cu amplificatorul în formă de U și fără grabă excesivă!!! În același timp, pentru a facilita procedura, șuruburile superioare care leagă pereții laterali și peretele din spate trebuie slăbite și strânse înapoi după instalarea capacului!!!**

10. Înainte de a ridica dulapul în poziția verticală, să nu uitați să instalați piciorușe din plastic.

11. **Puneți corpul dulapului pe picioarele din plastic în poziția verticală cu atenție, fără mișcări bruște, pentru a evita stricarea picioarelor!!!**

12. Instalați capacul împreună cu amplificatorul în formă de „II” și fără grabă !!!

13. Mutarea dulapului cu piciorușe pe podea trebuie să se întâmple cât mai atent, ridicînd dulapul pentru a evita stricarea piciorușilor. Mutarea dulapurilor MD-2 cu piciorușe instalate fără ridicarea este strict interzisă.

14. Înainte de a instala ușile, curățați vopsea din orificiile ușilor în care intră axele-butoane metalice din sus și din jos.

15. Nu strângeți excesiv șuruburile de fixare a mânerului pentru a evita tăierea șuruburilor !!!

16. Dacă se vede spațiu gol între ușa și axa-instalați șaiba sub axa de jos.

17. Pentru dulapuri: Ușile din sticlă și rafturile trebuie să fie instalate numai după plasarea finală a dulapului pe locul lui.. Balamalele ușilor din sticlă trebuie instalate până când se opresc cu flanșele bușelor din plastic în capacul și partiția dulapului. Deșurubați clemele balamale aproape complet, astfel încât ușile să se încadreze liber în balamale. Verificați prezența amortizoarelor din plastic pe cleme !!!

Notă. Se poate completa dulapurile cu cleme fara amortizoare. In acest caz, kit-ul include placi-garnituri din plastic care trebuie instalate între cleme si sticla.

Introduceți ușile în balamale cu clemele instalate cu grijă, orizontal, fără deformari !!! și ÎMPREUNĂ - unul ține ușa, al doilea strânge clemele.

Introduceți ușile în balamale cu atenție, într-o mișcare orizontală, fără distorsiuni și fără violență !!! În cazul în care ușa nu se potrivește în balamale în înălțime, scoateți ușa și dați o lovitură ușoară cu pumnul de sus pe partiție sau (și) în sus capacul, măbind distanța dintre balamale de-a lungul vertical. Încercați să introduceți din nou ușile cu grijă în balamale. Aliniați ușile de-a lungul capetelor balamalelor și fixați poziția ușilor cu o clemă în partea de sus și de jos. Verificați uniformitatea golurilor dintre uși și corp, verificați ușile pentru deschidere și închidere. Strângeți clemele rămase. Verificați din nou deschiderea și închiderea ușilor.

18. Înainte de a instala lăcățile trebuie să le orientați corect pentru închiderea-deschiderea.

EXPLOATAREA

19. Exploatarea dulapurilor trebuie să excludă deteriorarea acoperirii (zgirieturi) care cauzează apariția coroziunii metalului.

20. După spălarea dulapurilor, trebuie să fie asigurată uscarea dulapurilor cu o ventilație eficientă sau prin ștergerea suprafețelor umede cu cârpe uscate.

21. Sistemul de ventilare al încăperii trebuie să asigure un nivel de umiditate a aerului care să excludă formarea de condensat permanent pe suprafețele dulapurilor (cel mult 80% la temperatura de 1-40 grade C)

22. Cheile trebuie să fie folosite cu acuratețe, fără efort fizic.

23. În cazul în care apar careva defecțiuni la lacăte, contactați furnizorul pentru eliminarea defectelor, înlocuirea lăcăților sau pentru consultații.

24. Pentru a evita deteriorarea lăcăților ca rezultat al coroziunii pieselor, precum și cu scopul minimizării uzurii lăcăților și cheilor, se recomandă ca lăcățile lockerelor, precum și piesele în fricțiune, să fie unse periodic, nu mai rar decât o dată în 6 luni (lichid WD-40 în balonul cu spray, spray silicon).

Am luat cunoștință: _____
(funcția)

(Numele Prenumele)

L.Ș.