

3. Verificările funcționale trebuie efectuate acolo unde este posibil.
4. Dispozitivele cu cuplaj ar trebui verificate pentru asamblarea corectă.
5. Îndepărtați și reparați instrumentele/recipientele deteriorate.

Ambalați tava de instrumente cu folie dublă sau într-o cutie folosind folie de sterilizare aprobată de FDA.

Sterilizarea accesoriilor în cutia de sterilizare PowerPro Small System (PRO5095) și tava de sterilizare Hall (PRO6000)				
Metodă	Ciclu	Temperatură minimă	Expunere minimă	Ciclu de uscare minim
Abur	Pre-vid	270°F (132°C)	4 minute	25 minute
Abur	Gravitate	270°F (132°C)	15 minute	35 minute
PRECAUȚIE: Ciclu de uscare recomandat trebuie efectuat la toate accesoriile, de fiecare dată când sunt sterilizate. Nerespectarea unui ciclu de uscare poate duce la reducerea performanței produsului sau la defectarea prematură a produsului. utilizarea unui accesoriu care nu este complet rece și uscat poate reduce performanța și/sau fiabilitatea.				

PRECAUȚIE: Testarea demonstrează că un timp minim de uscare de 35 de minute este necesar pentru a preveni pachete umede când utilizați ciclul gravitațional.

INFORMAȚII DE CONTACT

Pentru mai multe informații, consultați manualul de instrucțiuni pentru atașamentul PowerPro, precum și manualul corespunzător al piesei de mână. Pentru mai multe informații sau o demonstrație de produs, contactați reprezentantul regional de vânzări CONMED sau sunați la 1-800-237-0169, în SUA.




EC REP
 MDSS GmbH
 Schiffgraben 41
 D-30175 Hanovra, Germania

CONMED Corporation

525 French Road
 Utica, NY 13502-5994 SUA
 Telefon: (727) 392-6464
 Serviciu clienți: 1-800-237-0169
 FAX SUA: (727) 399-5256
 FAX internațional: +1(727) 397-4540
 email: customer_service@linvatec.com
 www.conmed.com
 ©2017 CONMED Corporation. Toate drepturile rezervate.

Rx ONLY



W55-000-852

Rev AC

03/2017