

Secțiunea 2

COMENZI, AFIȘAJE ȘI CONECTORI

AVERTIZARE

Atunci când se utilizează un electrod dispersiv cu un singur strat, starea sau alerta indicatorului plăcuței nu oferă nicio indicație a calității contactului dintre electrodul dispersiv cu un singur strat și pacient.

2.1 Interfața utilizatorului

1. **Indicatorul de stare a electrodului dispersiv (plăcuță):** Indică starea unui electrod dispersiv când este conectat la ESU.
 - Indicatorul de stare a electrodului dispersiv va clipi roșu înainte de conectarea oricărui electrod dispersiv sau de conexiunea unui electrod dispersiv cu strat dublu care nu este aplicat pacientului.
 - Acest indicator se va aprinde verde intermitent după ce electrodul dispersiv cu strat dublu se aplică pe pacient, iar calitatea contactului electrodului dispersiv cu strat dublu este la un nivel acceptabil.
 - Histograma din stânga indicatorului de stare a electrodului dispersiv va indica calitatea conexiunii electrodului dispersiv la pacient (barele 1-4) atunci când electrodul dispersiv cu strat dublu este conectat pentru prima dată.
 - Toate cele patru indicatoare de bară vor fi iluminate la prima activare, indicând faptul că contactul inițial al electrodului dispersiv cu strat dublu este la un nivel acceptabil. Dacă, în timpul unei proceduri, calitatea contactului scade, indicatorii de bară vor fi stinși pe măsură ce calitatea contactului va scădea. Dacă toate cele patru indicatoare sunt stinse, va apărea o alertă a electrodului dispersiv, iar indicatorul de stare a electrodului dispersiv va deveni roșu.
- Electrozii dispersivi cu strat dublu nu sunt recomandați în majoritatea situațiilor deoarece nu oferă feedback ARM. Sistemul HelixAR ABC este livrat cu electrod dispersiv cu un singur strat dezactivat. A se vedea secțiunea 3, # 20 dacă unitatea utilizează în mod obișnuit electrozi dispersivi cu un singur strat și dorește să permită utilizarea acestora. Dacă nu este activat, sistemul HelixAR ABC va afișa un mesaj atunci când detectează un electrod dispersiv cu un singur strat, care solicită o confirmare din partea utilizatorului că intenționează să utilizeze electrodul dispersiv cu un singur strat.
 - Indicatorul plăcuței va deveni verde atunci când este conectată o plăcuță, dar histograma nu se va aprinde. Generatorul sesizează doar faptul că o plăcuță este conectată, dar nu poate sesiza dacă plăcuța se află pe pacient sau calitatea conexiunii dintre plăcuță și pacient atunci când se folosește un electrod dispersiv cu un singur strat.
2. **Controlul volumului:** Apăsați săgeata în sus pentru a crește volumul și săgeata în jos pentru a micșora volumul. Volumul anumitor alerte nu poate fi pus pe poziția silențios.
3. **Setări:** Apăsați pentru a modifica setările implicite ale sistemului.
4. **Taste de reglare a puterii de tăiere monopolară:** Reglează setarea puterii de ieșire a modului de tăiere selectat.

Figura 2.1 Interfața utilizatorului

