

Tăvi interioare HALL 50™

Număr de catalog	Descriere
PRO7000T	Tavă interioară mărime 3/4 HALL 50™, set complet
PRO7001T	Tavă interioară mărime 1/2 HALL 50™, set de burghie
PRO7002T	Tavă interioară mărime HALL 50™ 1/2, set ferăstrău

DESCRIERE

Tăvile interioare Hall 50™ sunt proiectate pentru a organiza și transporta convenabil piesele de mână cu baterie HALL 50, precum și atașamentele, accesoriile și bateriile cu litiu care pot fi utilizate cu piesele de mână. În combinație cu un recipient de sterilizare și un capac, aceste tăvi interioare se utilizează pentru ambalarea, transportarea și depozitarea instrumentelor HALL înainte de, în timpul și după sterilizarea cu abur. Aceste tăvi au fost calificate pentru utilizare cu recipientele Aesculap® de dimensiuni 1/2 și 3/4 cu fund solid (REF JK342 și JK742) sau cu recipientele HALL (REF TR12R și TR34R), precum și cu capacele și filtrele aferente. Pentru detalii suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare ale recipientelor, capacele și filtrele Aesculap.

UTILIZARE PRECONIZATĂ / INDICAȚII DE UTILIZARE

Tăvile interioare HALL 50 sunt destinate organizării instrumentelor HALL care urmează să fie sterilizate cu abur de către furnizorul de îngrijiri medicale.

În această tavă pot fi sterilizate piese de mână sau atașamente canulate cu un diametru interior de minim 0,031 inci (0,079 cm) și o lungime canulată maximă de 5,28 inci (13,41 cm), alături de alte instrumente necanulate și neporoase.

CONTRAINDICAȚII

1. Tăvile interioare HALL 50 nu sunt destinate utilizării în condiții de gravitație cu abur, sterilizare cu oxid de etilenă, gamma sau STERRAD®.

AVERTIZĂRI

1. Nu supraîncărcați tava. Supraîncărcarea poate împiedica fluxul aburului, poate cauza intervale de timp de uscare excesive, cutiile devenind prea grele pentru a putea fi manipulate în siguranță. Respectați instrucțiunile AAMI/AORN și îndrumările spitalului pentru încărcarea tăvilor. Nu depășiți 25 lbs (11,3 kg).

