



Lampa bactericidă UVC Navigator, putere 30W, pentru sterilizare

Lampa UVC cu montare pe perete este recomandată pentru incinte și spații mici (microbiologie, măsuțe instrumentar, hotel, spitale, clinici etc.), cu o suprafață de sterilizare de până la 30 mp.

- Prevăzută cu 1 tub generator de radiație UV-C (lungime de undă 253,7 nm);
- Durata de viață a tuburilor UV până la reducerea radiației UV cu 15%: minim 8000 ore;
- Unghi de iradiere: 180 grade;
- Tip montare: staționar;
- Alimentare: 220V / 50Hz, cablu de alimentare cu întrerupător ON/OFF;
- Termen de garanție: 24 luni.

TIMPUL DE STERILIZARE:

Suprafața	Țimp de sterilizare
până la 30 mp	15 min
30-60 mp	30 min
60-80 mp	60 min

APLICAȚII

Dezinfecția aerului și suprafețelor din încăperi cu încărcătură microbiană mare prin intermediul radiației UV (spitale, laboratoare de analize medicale, laboratoare de microbiologie, săli de operație, cabinete medicale individuale CMI, cabinete stomatologice, săli de așteptare, producția de medicamente, produse naturiste etc.).

MICROORGANISME DISTRUSE

Bacterii, viruși, spori de mușci, drojdii, alge, protozoare etc.

MOD DE INSTALARE

1. Îndepărtați corpul protector și tubul bactericid.
2. Conectați cablurile electrice la blocul terminal pentru conexiuni.
3. În interiorul cutiei veți găsi șuruburile corespunzătoare cu ajutorul cărora se realizează fixarea acestuia pe perete.
4. După montare puteți porni tensiunea de alimentare a instalației electrice.

ATENȚIE!!!

1. Înainte de a porni lampa, asigurați-vă că în camera respectivă nu au rămas persoane, animale sau plante.
2. Lumina ultravioletă reflectată dintr-o oglindă, de exemplu, poate fi la fel de dăunătoare pentru piele și ochi.
3. Nu lăsați aparatul nesupravegheat, la îndemâna copiilor sau a persoanelor lipsite de discernământ (cel mai bine închideți cu cheia camera în care acesta funcționează).
4. Lumina ultravioletă UV-C directă este dăunătoare pentru piele și mai ales pentru ochi, poate provoca arsuri grave.
5. Nu vă dezinfectați mâinile cu această lampă. Folosiți lumina ultravioletă UV-C doar pentru dezinfecția obiectelor. Pentru mâini folosiți săpunul sau alte produse recomandate.

6. Nu priviți direct la lampă în timpul utilizării.
7. Lucruri precum tablouri, pânze, fotografii și, în general, obiecte care pot fi deteriorate de lumina soarelui nu sunt, de asemenea, recomandate să fie expuse la lumina directă a lămpii UV-C.
8. Opriți lampa atunci când doriți să o curățați.
9. Dacă temperatura camerei este mai mică de 20 grade Celsius sau mai mare de 40 grade Celsius, timpul de sterilizare trebuie extins.
10. După ce s-a încheiat ciclul de sterilizare al încăperii, nu intrați imediat. Incinta trebuie aerisită minimum 15 minute.
11. Nu lăsați copii în preajma dispozitivului.

COLECTAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR

Acest simbol indică faptul că acest produs face obiectul unei colectări separate.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie colectate separat și să nu fie eliminate împreună cu deșeurile menajere.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie predate unui sistem de colectare, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE.

Echipamentele electrice și electronice sunt periculoase pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, ca urmare a prezenței în ele a unor substanțe periculoase.

Pentru informații privind predarea și colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale și centrele de colectare autorizate în acest sens.