

1.3 Explicarea simbolurilor

1.3.1 Panoul de comandă

Notă: Unitățile internaționale System 5000™ utilizează simboluri pe panoul de comandă. Unele simboluri sunt înlocuite cu cuvinte pe unitățile interne (SUA). Aceste cuvinte sunt indicate prin text cu caractere aldine în descrierea simbolurilor.



Formă de undă **Pure Cut** cu daune termice minime și hemostază.



Formă de undă **Blend 1** cu hemostază moderată.



Formă de undă **Blend 2** cu hemostază medie.



Formă de undă **Blend 3** cu hemostază maximă.



Coagulare monopolară **Pinpoint**.



Coagulare monopolară **Standard**.



Coagulare monopolară **Spray**.



Coagulare bipolară **Micro**



Coagulare bipolară **Macro**



Configurare **Generală**



Modul de specialitate **Fluids**



Modul de specialitate **Lap**



Electrod dispersiv unic
Indicator stare/alarmă pentru electrozi dispersivi monopolari unici.



Electrod dispersiv dublu
Indicator stare/alarmă pentru electrozi dispersivi monopolari dubli.



Indicator de curent **de ieșire** bipolar



Modul Pulse (Impuls)




Tasta de control de la distanță:
Apăsăți pentru a activa sau a dezactiva
Controlul puterii de la distanță.



Program



Cheie de stocare program

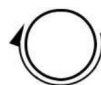

Buton de derulare selecție

1.3.2 Interiorul



Împământare de protecție (conector de admisie)



Schemă electrică de înaltă tensiune

1.3.3 Panoul de ieșire/comandă



Electrod dispersiv –
Conexiune pentru electrodul dispersiv monopolar.



Priză universală accesorii
ReadiPlug™

