

Document de lansare pe piață

MARKETING COMMUNICATIONS

KATANA CUTTER PENTRU SUTURĂ DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ

03/15/07

ConMed Linvatec are plăcerea de a anunța lansarea dispozitivului Katana High Strength Suture Cutter. Cutterul Katana oferă chirurgilor o metodă îmbunătățită de tăiere a suturilor de înaltă rezistență. Cutterul Katana elimină nevoia de a înfila firele de sutură în tăietoare cu mecanismul său de încărcare laterală ușor de utilizat.

Specificatii Produs:

- Lungimea de lucru
 - GU1009: 142mm
 - GU1009EL: 210mm
- Diametru: 4mm
- Material Instrument (ax) — 455 Oțel
- Material vârf de tăiere – Carbură
- Proiectat pentru a tăia #1 monofilament la #2 Hi-Fi
- Lungimea cozii cu sutură tăiată: 3 mm





Indicatii chirurgicale:

- Arthroscopia Umărului
- Arthroscopia șoldului

Încărcarea suturii și tehnica tăierii

1. După finalizarea reparației chirurgicale, când tăiați cu mâna dreaptă, așezați dispozitivul de tăiere pentru sutură Katana High Strength deasupra și perpendicular pe firele de sutură care vin din articulație.
*Dacă tăiați cu mâna stângă, vă veți apropia de sub firele de sutură.
2. Așezați firele de sutură în fanta laterală.
3. În timp ce mențineți tensiunea pe firele de sutură, întoarceți dispozitivul de tăiere a suturii de înaltă rezistență Katana paralel cu firele de sutură, astfel încât suturile să iasă din fanta de sus.
4. Folosind o metodă de „împingere a nodurilor”, glisați dispozitivul de tăiere a suturii Katana High Strength în articulație, oprindu-se la capătul proximal al stivei de noduri. Nu strângeți mânerul și mențineți cablurile de sutură întinse.
5. Dacă este posibil, verificați dacă nodul proximal rămâne în afara vârfului distal și firele de sutură rămân în interiorul fantei superioare a dispozitivului de tăiere pentru sutură Katana High Strength.
6. Mențineți tensiunea pe firele de sutură și strângeți mânerul pentru a tăia firele de sutură.

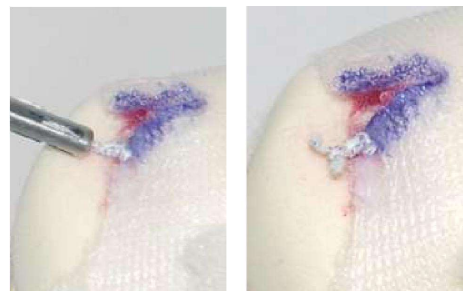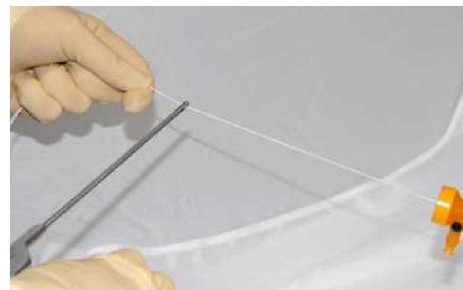

C.E. Marcaj

Shoulder Arthroscopy