

<b>Element</b>	<b>Setare implicită</b>
Aplicare corecții parametri la CC	Activat
Înregistrare toate activitățile de măsurare	Neactivat
Conversie automată unitate temp.	Neactivat
Activare economizor de ecran	Activat
Afișare bară de parametri	Activat
Corecție HbF	Activat pentru niveluri > 20 %
Mesaj analizor	-
Activări economizorul de ecran (este afișată perioada de timp în care analizorul nu trebuie să fie utilizat înainte de afișarea economizorului de ecran)	5 minute

### **Setări imprimantă - setări implicate**

<b>Element</b>	<b>Setare implicită</b>
Imprimante instalate	Imprimanta analizorului
Tipărire manuală (pentru afișarea și selectarea imprimantei din lista imprimantelor instalate)	Dezactivat

### **Tipărire automată – setări implicate**

<b>Element</b>	<b>Setări implicate</b>
Rezultate pacient	Activat
Rezultate CC	Dezactivat
Rezultate calibrare	Dezactivat
Mesaje jurnal activitate	Dezactivat
Nivel mesaj	Utilizator
Număr de copii (pentru tipărire)	1

### **Arhivare automată - setări implicate**

<b>Element</b>	<b>Setare implicită</b>
Jurnal rezultate pacient	Activat
Jurnal calibrare	Activat
Jurnal control calitate	Activat
Jurnal activitate	Activat
Stocați arhivele în analizor	Activat

S14