


PREGĂTIREA CAMEREI CARE URMEAZĂ SĂ FIE TRATATĂ

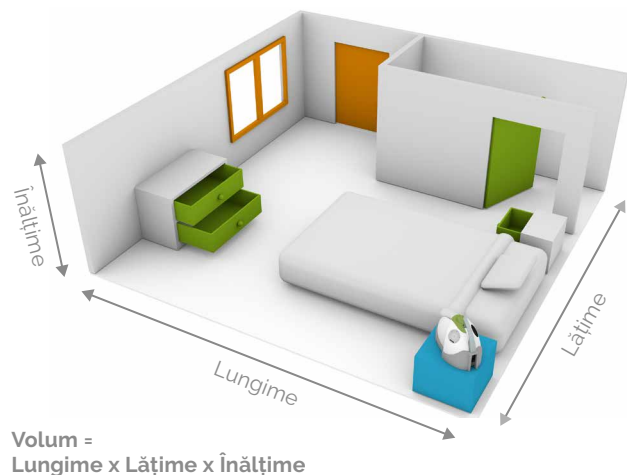

Așezați Nocospray pe o suprafață dură, solidă, la cel puțin un metru față de sol, dacă este posibil.

Îndreptați duza Nocospray spre cea mai mare zonă deschisă din încăperea care urmează să fie tratată.

Deschideți toate zonele care nu sunt expuse direct la tratament (uși, sertare etc.) înainte de a porni Nocospray.

Închideți ferestrele înainte de a porni Nocospray.

Asigurați-vă că toate intrările în încăperea care urmează să fie tratată sunt închise atunci când Nocospray este în funcțiune. Nimeni nu trebuie să se afle în încăperea în cursul tratamentului.

POZIȚIONAREA FLACONULUI

1



Scoateți duza aparatului de nebulizare, apăsând pe buton.

2



Datați și apoi înfiletați flaconul de produs pe duza aparatului de nebulizare. Nu strângeți prea tare pentru a evita deteriorarea sigiliului.

3



Repoziționați duza pe aparat. Ar trebui să auziți un „clic”.

GHID DE TRATARE A CAMEREI

VOLUMUL CAMEREI (m³)	10	15	20	30	40	50	100	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
TIMP DE DIFUZIE (minut: secundă)	00:36	00:54	01:12	01:48	02:24	03:00	06:00	12:00	15:00	18:00	24:00	30:00	36:00	42:00	48:00	54:00	60:00
CONSUM (ml)	10	15	20	30	40	50	100	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000

Utilizați produsele biocide cu atenție. Înainte de utilizare, citiți eticheta și informațiile despre produs.

UTILIZAREA APARATULUI

1

Conectați cablul de alimentare Nocospray 2. Setați comutatorul pe I.




2

Selectați volumul pe care trebuie să-l tratați, glisând degetul pe partea deschisă la culoare a tastaturii. În modul standard, volumul implicit este de 10m³. Intervalul de selecție este cuprins între 10m³ și 1000m³.




3

Intervalul este progresiv: dacă două LED-uri sunt aprinse, este selectată valoarea intermediară. De exemplu, dacă sunt aprinse LED-urile 10 și 20, volumul selectat este de 15 m³.

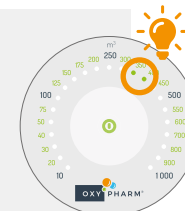

4

Pentru a începe, apăsați pe butonul situat în centrul tastaturii (apăsare prelungită).

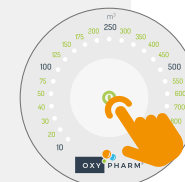

5

Se aude un bip timp de 15 secunde, înainte ca aparatul să intre în funcțiune. Părăsiți încăperea înainte de expirarea intervalului de 15 secunde. La finalul difuzării, se va auzi un bip. Aparatul se oprește automat.



INSTRUMENTE



NOCOSPRAY: DISPOZITIVUL NOSTRU DE DIFUZIE UȘOR ȘI PORTABIL

Disponibil ca unitate montată pe perete sau ca unitate care trece prin perete.

NOCOMAX EASY: DISPOZITIVUL NOSTRU DE DIFUZIE PENTRU VOLUME MARI

Disponibil ca unitate montată pe perete.



PRODUSE DETERGENȚI

BIOSWEEP S

Degresant natural, neionic.



BIOSWEEP Z

Detergent natural și neionic, gata de utilizare, care conține enzime.



BIOMOP

Detergent degresant natural, neionic, concentrat, pentru pardoseli.



PRODUSE INSECTICIDE

OXYPY

Oxypy eradică insectele zburătoare și târătoare și scabia.



OXYPY+

Oxypy+ eradică insectele zburătoare și târătoare și ploșnițele (larve și adulți).



PRODUSE DEZINFECTANTE

NOCOLYSE

Biodezinfectant gata de utilizare care conține 6% peroxid de hidrogen și 17 ppm de argint.



NOCOLYSE ONE SHOT

Biodezinfectant gata de utilizare care conține 12% peroxid de hidrogen și 17 ppm de argint.



NOCOLYSE FOOD

Biodezinfectant gata de utilizare care conține 7,9% peroxid de hidrogen, fără argint. Potrivit pentru tratarea suprafețelor care intră în contact cu alimentele.



FĂRĂ BANI

KIT DE MONITORIZARE A CALITĂȚII

Nocobox este o capsulă de cultură care conține substanțe nutritive care favorizează creșterea bacteriilor și evidențiază prezența bacteriilor pe suprafețe. Nocotest monitorizează distribuția uniformă a produsului nostru.



ACCESORII

TELECOMANDĂ

Permite activarea difuzorului din afara încăperii. Funcționează numai cu Nocospray.



KIT DE SISTEM DE PENETRARE A PEREȚILOR

Sistem de penetrare a pereților pentru dezinfectarea unei încăperi fără a intra în ea. Funcționează numai cu Nocospray.



PROGRAMATOR

Permite activarea automată a difuziei (sunt posibile diverse setări). Funcționează cu Nocospray și Nocomax Easy.



DUZĂ DUBLĂ

Permite difuzia în două direcții, ideală pentru spațiile lungi și înguste, cum ar fi coridoarele. Funcționează numai cu Nocospray.

