

ARCHITECT SYSTEM

HIV Ag/Ab Combo Calibrator

DOMENIU DE UTILIZARE

ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator este utilizat pentru calibrarea ARCHITECT i System atunci când acesta este utilizat pentru detectarea calitativă simultană a antigenului HIV p24 și a anticorpilor la virusul imunodeficienței umane tip 1 și/sau tip 2 (HIV-1/HIV-2) în serul sau plasma umane. Consultați prospectul reactivului ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo pentru informații suplimentare.

CONȚINUT

1 flacon (4 mL) de ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator 1 (**CAL 1**): HIV purificat viral lizat preparat în tampon TRIS cu ser fiziologic și stabilizator de proteină (bovin). Conservant: azidă de sodiu.


Calibrator	Culoare
CAL 1	Roșu ^a

^a Colorant: Red D&C No. 33

STANDARDIZAREA

Pentru a menține o sensibilitate constantă < 50 pg/mL a antigenului HIV-1 p24, ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator are o concentrație de antigen HIV-1 p24 raportată la panelul standardului internațional Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

MĂSURI DE PRECAUȚIE

- **IVD**
- Pentru utilizarea diagnosticului *In Vitro*
-  **ATENȚIE:** Acest produs conține componente de origine umană și/sau potențial infecțioase. Consultați secțiunea **CONȚINUT** a acestui prospect. Nicio metodă de testare cunoscută nu poate oferi certitudinea că produsele derivate din surse umane sau microorganisme inactivate nu vor transmite infecția. Prin urmare, toate materialele de origine umană trebuie considerate potențial infecțioase. Este recomandat ca acești reactivi și probele umane să fie tratate în conformitate cu Standardul OSHA privind agenții patogeni cu transmitere sanguină.¹ Nivel de biosiguranță ² sau alte practici corespunzătoare de biosiguranță^{3,4} ar trebui folosite pentru materiale care conțin sau sunt suspectate că ar conține agenți infecțioși.
- **CONTAINS: AZIDE** Acest produs conține azidă de sodiu. În contact cu acizi degajă un gaz foarte toxic.
- Materialul și recipientul său trebuie eliminate în deplină siguranță.
- Fișele cu date de securitate sunt disponibile pe www.abbottdiagnostics.com sau contactați reprezentantul local în legătură cu acestea.

DEPOZITARE

- ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator este stabil până la data expirării atunci când este depozitat și manipulat conform instrucțiunilor.
- Nu utilizați după data expirării.



PREGĂTIREA PENTRU ANALIZĂ

- Calibratorul poate fi utilizat imediat după scoaterea din unitatea de depozitare cu temperaturi între 2-8°C. Înainte de utilizare, amestecați prin întoarcere ușoară (5-10 ori). După fiecare utilizare, închideți bine capacele și depozitați din nou calibratorul în unitatea de depozitare cu temperaturi între 2-8°C.



RO

REF 4J27-03

G81317R04

S4J2SM

Citiți modificările subliniate
revizuite în februarie 2020

BIBLIOGRAFIE

1. US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 29 CFR Part 1910.1030, Bloodborne pathogens.
2. US Department of Health and Human Services. *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories*. 5th ed. Washington, DC: US Government Printing Office; December 2009.
3. World Health Organization. *Laboratory Biosafety Manual*. 3rd ed. Geneva: World Health Organization; 2004.
4. Clinical and Laboratory Standards Institute. *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections: Approved Guideline—Third Edition*. CLSI Document M29-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2005.

ARCHITECT este o marcă comercială a Abbott Laboratories în diverse jurisdicții.



Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580



0123

Februarie 2020
© 2004, 2020 Abbott Laboratories



Legenda simbolurilor utilizate

GTIN

Număr global de articol comercial

PRODUCT OF GERMANY

Produs în Germania