

2.0 Descrierea produsului

2.1 Panoul frontal al consolei de irigare CrystalView™ Pro



Consola de irigare CrystalView™ Pro este concepută să furnizeze reglaje de presiune între 10 mmHg și 150 mmHg în incrementuri de 5 mmHg.

Consola de irigare CrystalView™ Pro menține un flux de ieșire selectat fără a afecta presiunea. Setările de debit sunt OFF (DEZACTIVAT), LOW (SCĂZUT) (50 ml/min), MED (MEDIU) (150 ml/min) și HIGH (RIDICAT) (300 ml/min). În orice moment în timpul unei proceduri, chirurgul poate regla manual debitul prin intermediul interfeței grafice cu utilizatorul sau cu telecomanda CrystalView™ Pro pentru modificarea parametrilor chirurgicali. Dacă se detectează funcționarea raclorului, supapa de transfer se va deplasa în poziția de aspirație și debitul se va schimba la setarea de aspirație LOW (SCĂZUT) (500 ml/min), MED (MEDIU) (850 ml/min) sau HIGH (RIDICAT) (1200 ml/min).

NOTĂ: Când nu este conectată caseta de flux de ieșire a setului de tubulatură 24k100, funcțiile de drenare nu sunt activate (aspirație, flux de ieșire sau drenare).

1. **Butonul Alimentare/Standby** – Apăsați pe acest buton pentru a comuta consola între modurile Standby și Activat. În modul Activat, LED-ul este aprins (verde). Pentru a seta echipamentul la modul Standby, apăsați din nou pe acest buton; LED-ul va ilumina în portocaliu.
2. **Priza pentru telecomandă** – Introduceți aici conectorul telecomenzii CV4040. Inelul luminos se aprinde (albastru) în jurul prizei atunci când consola recunoaște că este conectată telecomanda.
3. **Capul pompei de flux de intrare** – Încărcați aici setul de tubulatură de intrare. Livrează fluid printr-o canală la locul chirurgical.
4. **Fereastra senzorilor de presiune** – Senzori de presiune care detectează presiunea fluidului care curge prin casetele de tubulatură atașate.

PRECAUȚIE: Mențineți zona ferestrei senzorului de presiune curate. Nu permiteți obiectelor ascuțite să intre în contact cu această zonă. Nu apăsați pe această zonă.

