



Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
 10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
 дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)
 ДВ: комплекс ЧАС, глиоксаль, синергисты биоцидов

Антимикробная активность:

- **бактерии** (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на *M. terrae*)
- **вирусы** (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- **патогенные грибы**, включая плесневые

Преимущества:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования (в течение 14 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Назначение:

- **дезинфекция и мытье:**
 - поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования;
 - лабораторной и столовой посуды; белья, предметов ухода за больными; уборочного инвентаря;
 - мусороборочного оборудования и мусоросборников;
- **дезинфекция:**
 - медицинских отходов класса Б и В;
 - крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты) в лечебно-профилактических организациях, включая диагностические и клинические лаборатории; станции и пункты переливания и забора крови;
- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т. ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка):
 - всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
 - эндоскопов жестких и гибких;
 - оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем;
- **проведение генеральных уборок**, в т. ч. с использованием уборочных технологий;
- **борьба с плесневыми грибами.**

Режим дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии — 0,01% / 0,05% / 0,2% / 0,5% — 120 мин. / 60 мин. / 15 мин. / 5 мин.
Вирусы — 0,1% / 0,25% / 0,5% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Микобактерии туберкулеза — 0,5% / — 60 мин.

Дезинфекция ИМН + предстерилизационная очистка:

—
 0,2% / 0,4% — 60 мин. / 30 мин.
 0,5% / 1,0% / 2,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.