



# MEDISEPT

Perfect disinfection



## Velodes® Silk

**Lichid pentru dezinfectarea igienică și chirurgicală a mâinilor și pentru dezinfectarea suprafețelor**

### Proprietățile produsului:

- Activ contra influenza și coronavirus.
- Dezinfectarea igienică a mâinilor: 2 x 3 ml în 30 sec. (de 2 ori a câte 3 ml. timp de 15 sec.)
- Dezinfectarea chirurgicală a mâinilor: 2 x 3 ml în 3 min. (de 2 ori a câte 3 ml. timp de 90 sec.)
- Dezinfectarea suprafețelor de la 30 la 60 sec.

### Beneficiile utilizatorului:

- Eficiență garantată
- Hidratare și îngrijire pentru piele
- Comod de utilizat
- Efect rapid
- Previne aderența mâinilor



Lichid



Activ contra B,  
F, V, Tbc,  
Rota, Noro



Dezinfectarea  
igienică a mâinilor  
în 30 sec.



Dezinfectarea  
chirurgicală a  
mâinilor în 3 min.

## Aplicarea:

Gata de utilizare, produs pe bază de alcool conceput pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale neinvazive și dezinfectarea chirurgicală și igienică a mâinilor în domeniul medical, sectorul alimentar, domeniul industrial și casnic, utilități publice. Pentru suprafețele care au sau nu contact cu produsele alimentare. Destinat de asemenea pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale neinvazive. Produsul posedă acțiune bactericidă, fungică și acțiune limitată virucidă (contra Rotavirus, Norovirus), de asemenea activ contra tuberculozei și virusurilor încapsulate (incl. Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, Influenza și coronavirus). Fiind dispozitiv medical destinat doar pentru uz profesional.

### Condiții

Eficacitatea:	EN 14885	Condiții	
		Curat	Murdar
Bacteria (including MRSA)	EN 13727	30 sec.	30 sec.
Fungi ( <i>C. albicans</i> )	EN 13624	15 sec.	15 sec.
Tuberculosis ( <i>M. terrae</i> )	EN 14348	30 sec.	30 sec.
Enveloped viruses (Vaccinia, HIV, HBV, HCV)	EN 14476	30 sec.	60 sec.
BVDV virus	EN 14476	30 sec.	30 sec.
Rota virus	EN 14476	30 sec.	60 sec.
Noro virus	EN 14476	30 sec.	30 sec.
Hygienic hand disinfection	EN 1500	2 x 3 ml in 2 x 15 sec.	
Surgical hand disinfection	EN 12791	2 x 3 ml in 2 x 90 sec.	

## Modul de utilizare:

**Dezinfectarea igienică a mâinilor** (în conf. cu EN 1500): 2 x 3 ml de produs se masează între mâini timp de 30 sec. (de 2 ori a câte 3 ml. timp de 15 sec.).

**Dezinfectarea chirurgicală a mâinilor** (în conf. cu EN 12791): 2 x 3 ml de produs se masează între mâini timp de 3 min. (de 2 ori a câte 3 ml. timp de 90 sec.).

Păstrați mâinile umezite egal prin adăugare suplimentară de produs.

**Dezinfectarea suprafețelor:** Se pulverizează suprafața de la distanța de 30 cm. și se lasă să se usuce. Nu se aplică pe suprafețe sensibile la alcool (ex. sticlă acrilică). Doar pentru uz profesional.

## Unități de ambalare:

- Flacon 250 ml.
- Flacon 500 ml.
- Flacon 1 lit.
- Pungă 1 lit.



Numărul permisului pentru produse biocide în Polonia: 7674/19

Fișa Tehnică cu Date de Securitate și Fișa Tehnică de Componentă sunt disponibile pe [www.medissept.pl](http://www.medissept.pl)

**CE 2274**



Compania responsabilă:  
**MEDISEPT Sp. z o.o.**  
 Konopnica 159 c  
 21-030 Motycz

tel.: +48 81 535 22 22  
[export@medissept.pl](mailto:export@medissept.pl)  
[www.medissept.pl](http://www.medissept.pl)

Importator:  
 S.A. "M-INTER-FARMA", Republica Moldova MD2025,  
 Mun. Chișinău, Str. Grenoble, 23 Tel. +373(22) 904-  
 006, +373 (22) 904-005

Revision: 02.2020