

Instrucțiune de utilizare a produsului dezinfectant



Viruton® Forte

Concentrat pentru curățarea și dezinfectarea instrumentelor chirurgicale

Viruton Forte este un produs extrem de eficient pentru curățarea și dezinfectarea simultană a tuturor tipurilor de instrumente chirurgicale. Prezența inhibitorilor de coroziune asigură compatibilitatea mare cu instrumentele fabricate din oțel inoxidabil și aluminiu, sticlă, porțelan, metal, cauciuc sau materiale plastice. Produsul posedă un spectru larg de acțiune și

proprietăți excepționale de curățare datorită formulei inovatoare bazată pe sinergia surfactanților și tehnologiei nanomicelle.

Instrucțiuni de utilizare: Se prepară soluția de lucru prin diluarea concentratului cu apă. Nivelul de diluare depinde de spectrul dorit și durata de acțiune. Flaconul de 1 L. are dozator integrat: 10 ml de concentrat la 990 ml de apă oferă concentrația de 1 %. Instrumentele trebuie scufundate imediat după utilizare în soluție. Toate componentele și orificiile instrumentelor trebuie să fie complet umplute și acoperite cu soluție. După dezinfectare instrumentele se clătesc cu apă și se usucă. Valabilitatea soluției de lucru necontaminate este de 14 zile. Nu se amestecă cu alți detergenți sau dezinfectanți. Din motive igienice se recomandă schimbarea, cel puțin, zilnică a soluției. Recomandat pentru uz profesional.

Substanțe active: 100 g conțin: săruri cuaternare de amoniu, diamine: 3,76 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecilopropan-1,3—diamină (CAS: 2372-82-9), 3,39 g Poli(oxi-1,2-etanodilo),.alfa.42-(didecilmetilamino)ethilo],omega.-hidroxi-,propanoate (sare) (CAS: 94667-33-1), 0,75 g 2 aminoetanol (CAS: 141-43-5).

Ambalaj: flacon 1 L. cu dozator; canistra 5 L.

Activitatea microbiologică:

Eficacitatea:	EN 14885	15 min.	30 min.
Bacteria (inclusiv MRSA)	EN 13727	0,5%*, 1%	
	EN 14561	1%	0,5%
	EN 13697	1%	0,5%
Fungi (C. albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
	EN 13697	1%*	
Mycobacteria (M. avium)	EN 14348	0,5%*	
Mycobacteria (M. avium, M.terrae)	EN 14348	1%*	
Virusuri încapsulate (Vaccinia and BVDV and other like: HBV, HIV, HCV, SARS, Herpes, Influenza type A, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Adeno virus	EN 14476	1%	
Polio virus	EN 14476	4%	

*condiții de curățenie

DOMENII DE UTILIZARE



Reprezentant oficial în Republica MOLDOVA:



S.A. M-INTER-FARMA

**MD 2025 Mun.Chisinau, str. Grenoble 23
Tel: (022) 904 - 006, 904 - 005, Fax: 904 - 007**

Număr de înregistrare de stat a dispozitivelor medicale Nr. DM000037772, DM000037773