

ARCHITECT**SISTEM**

HIV Ag/Ab Combo Calibrator

DOMENIU DE UTILIZARE

Calibratorul ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo este utilizat pentru calibrarea ARCHITECT i System atunci când acesta este utilizat pentru detectarea calitativă simultană a antigenului HIV p24 și a anticorpilor la virusul imunodeficienței umane tip 1 și/sau tip 2 (HIV-1/HIV-2) în serul sau plasma umane. Consultați prospectul reactivului ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo pentru informații suplimentare.

CONȚINUT

1 flacon (4 mL) de ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator 1 (**CAL 1**): HIV purificat viral lizat preparat în tampon TRIS cu ser fiziologic și stabilizator proteic (bovin). Substanță conservantă: azidă de sodiu.

Calibrator	Culoare
CAL 1	Roșu ^a

^a Colorant: Roșu D&C Nr. 33

STANDARDIZAREA

Pentru a menține o sensibilitate constantă < 50 pg/mL a antigenului HIV-1 p24, calibratorul ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo are o concentrație de antigen HIV-1 p24 antigen menționată în panelul standardului internațional Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

MĂSURI DE PRECAUȚIE

• IVD

- Pentru utilizarea diagnosticului *In Vitro*

-  **ATENȚIE:** Acest produs conține componente de origine umană și/sau potențial infecțioase. Consultați secțiunea **CONȚINUT** a acestui prospect. Nicio metodă de testare cunoscută nu poate oferi certitudinea că produsele derivate din surse umane sau microorganisme inactivate nu vor transmite infecția. Prin urmare, toate materialele de origine umană trebuie considerate potențial infecțioase. Este recomandat ca acești reactivi și probele umane să fie tratate în conformitate cu Standardul OSHA privind agenții patogeni cu transmitere sanguină.¹ Nivel de biosiguranță 2² sau ar trebui folosite alte practici corespunzătoare de biosiguranță^{3,4} pentru materiale care conțin sau sunt suspectate că ar conține agenți infecțioși.
- **CONTAINS: AZIDE** Acest produs conține azidă de sodiu. În contact cu acizi degajă un gaz foarte toxic.
- Materialul și recipientul său trebuie eliminate în deplină siguranță.
- Fișele cu date de securitate sunt disponibile pe www.abbottdiagnostics.com sau contactați reprezentantul local în legătură cu acestea.

DEPOZITARE

- Calibratorul ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo este stabil până la data expirării atunci când este depozitat și manipulat conform instrucțiunilor.
- Nu utilizați după data expirării.

•  2°C - 8°C

PREGĂTIREA PENTRU ANALIZĂ

- Poate fi utilizat imediat după scoaterea din unitatea de depozitare la temperaturi între 2-8°C. Înainte de utilizare, amestecați prin întoarcere ușoară (5-10 ori). După fiecare utilizare, închideți bine capacele și depozitați din nou controalele la temperaturi între 2-8°C.

**ro****REF** 4J27-03**G81317R03****S4J2SM**

Citiți modificările subliniate
revizuite în mai 2019

BIBLIOGRAFIE

1. US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 29 CFR Part 1910.1030, Bloodborne pathogens.
2. US Department of Health and Human Services. *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories*. 5th ed. Washington, DC: US Government Printing Office; December 2009.
3. World Health Organization. *Laboratory Biosafety Manual*. 3rd ed. Geneva: World Health Organization; 2004.
4. Clinical and Laboratory Standards Institute. *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections: Approved Guideline—Third Edition*. CLSI Document M29-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2005.

ARCHITECT este marcă înregistrată Abbott Laboratories în diverse jurisdicții.



ABBOTT
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580



0123

Mai 2019

© 2004, 2019 Abbott Laboratories



Legenda simbolurilor utilizate

GTIN

Număr global de articol comercial

PRODUCT OF GERMANY

Produs în Germania