

3.5 Instalarea senzorului de raclor

3.5.1 Instalarea cablului de interfață al pompei (D4024)

Pentru consolele de antrenare capabile să simuleze un senzor de raclor, de exemplu D4000, operatorul trebuie să conecteze un capăt al cablului la portul de intrare de pe panoul din spate al consolei de irigare CrystalView™ Pro, iar celălalt capăt la portul de ieșire al senzorului de raclor de pe consola de antrenare.



3.5.2 Instalarea senzorului de raclor 24k (24k900)

Operatorul trebuie să instaleze senzorul de raclor 24k (24k900):

1. Conectați capătul cablului senzorului de raclor la portul de intrare de pe panoul din spate al consolei de irigare CrystalView™ Pro. Când echipamentul este pornit, se aprinde un singur LED al senzorului de raclor pentru confirmarea conexiunii.
2. Fixați celălalt capăt al cablului senzorului în apropierea conectorului cablului piesei de mână de pe consola de antrenare. Când echipamentul este pornit, se aprind ambele LED-uri de pe senzorul de raclor pentru confirmarea conexiunii.



3.5.3 Instalarea cablului prelungitor (24k191)

Acest cablu poate fi utilizat în combinație cu oricare dintre opțiunile de senzor de raclor de mai sus. Operatorul trebuie să conecteze cablul prelungitor la portul de intrare de pe panoul din spate al consolei de irigare CrystalView™ Pro, apoi să conecteze fie cablul de interfață al pompei, fie senzorul de raclor la celălalt capăt.