

Instrucțiuni de utilizare pentru Masa de manipulare medicală

Masă de manipulare medicală model: MPS -002

Masa este proiectată pentru utilizarea în instituții medicale (camere medicale, săli de operație, săli de proceduri etc.)

Masa este fabricată din oțel de inox AISI 304 de înaltă calitate, 2 polițe din oțel de inox de înaltă calitate, astfel încât este potrivită pentru utilizarea în încăperi cu cerințe ridicate pentru tratarea și dezinfectarea mobilierului.

Domeniul de aplicare plasarea instrumentelor medicale, preparatelor și consumabilelor utilizate în timpul operațiilor chirurgicale, examinărilor și altor manipulări.

Două rafturi din oțel inoxidabil, cu care este echipată masa, au o margine pe toate părțile.

Aceasta previne căderea obiectelor așezate pe suprafață în timpul deplasării produsului.

Masa are o mobilitate mare datorită prezenței a 4 roți.. Două roți sunt echipate suplimentar cu frâne, ceea ce vă permite să fixați masa dacă este necesar. Dotată cu miner de transportare.

Indicații de utilizare: pentru amplasarea în saloane, săli de tratament și de examinare.

Contraindicații: niciuna atunci când este utilizată în conformitate cu documentația de operare.

Nu mișcați masa în timpul procedurilor, puneți frâne pe roți!

Denumirea principalilor parametri și dimensiuni	MPS - 002
Înălțimea mesei	910 mm
Lățimea mesei	550 mm
Lungimea mesei	720 mm
Roți cu diametru 100mm	4, 2 cu frână
Sarcina admisibilă a raftului	20-25kg

Reguli de funcționare a echipamentului

1. Transportul, depozitarea și exploatarea produsului trebuie efectuate în conformitate cu parametrii din tabel.
2. Masa medicală trebuie să fie exploatată în încăperi închise uscate, cu o temperatură nu mai mică de +2°C și nu mai mare de +40°C și o umiditate relativă de 45 - 70%.
3. Nu permiteți expunerea directă la lumina soarelui, deoarece dăunează aspectului produselor, poate schimba culoarea suprafeței.
4. Masa trebuie să fie instalată la o distanță de cel puțin 0,5 m de dispozitivele de încălzire.
5. Echipamentul trebuie protejat de deteriorări mecanice și de expunerea la substanțe chimice agresive.
6. Este interzisă utilizarea pentru curățare a obiectelor ascuțite, a acizilor, a soluțiilor alcaline, precum și a agenților abrazivi destinați îngrijirii veselei și a obiectelor sanitare.

Îngrijirea suprafețelor din oțel inoxidabil

1. Produsele necesită puțină întreținere și sunt practice de utilizat.
2. Produsul poate fi curățat cu orice agent de curățare pe bază de alcool, cu excepția celor cu un principiu de acțiune abraziv.
3. O perie moale poate fi utilizată pentru curățarea murdăriei dificile.

Condiții de garanție

- Perioada de garanție este de 24 de luni de la data vânzării produsului.
- **Produsul este scos din serviciul de garanție dacă:** cumpărătorul a încercat să repare singur produsul;
 - au fost detectate modificări neautorizate în proiectarea produsului;
 - daune mecanice cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

Garanția nu se aplică elementelor de fixare și altor produse achiziționate care nu sunt fabricate de această societate



Producător: Caravan Express SRL
Republica Moldova
or. Cimișlia, MD-4101

