

- Înainte de utilizare verificați dacă electrodul este introdus complet și fixat în piesa de mână.

Curățare:

După îndepărtarea electrocului curățați orice reziduu vizibil acumulat pe dispozitiv în timpul utilizării cu o perie de curățat instrumente moale, nemetalică și cu un detergent blând și apă purificată sterilă. Clătiți minuțios cu apă purificată sterilă până la îndepărtarea completă a reziduurilor și a detergentului, apoi uscați complet folosind un prosop steril (nu scufundați în lichide).

Sterilizare:

Au fost validate sterilizarea cu abur la autoclavă cu pre-vidare și înlocuire gravitațională, cu următorii parametri:

- Aburi/Pre-vidare (pulsat) - Pentru sterilizare puneți piesa de mână într-un ambalaj dublu din muselină sau un plic dublu autosigilant echivalent și așezați într-un singur strat într-o tavă deschisă , într-o autoclavă cu aburi cu pre-vidare. Procesați la 132-135°C pentru cel puțin 3 minute, fără a depăși 4 minute. Timpul de uscare recomandat este de 5 minute la 132-135°C.
- Aburi/ Înlocuire gravitațională - Pentru sterilizare puneți piesa de mână într-un ambalaj dublu din muselină sau un plic dublu autosigilant echivalent și așezați într-un singur strat într-o tavă deschisă , într-o autoclavă cu aburi cu înlocuire gravitațională. Procesați la 132-135°C pentru cel puțin 10 minute, fără a depăși 15 minute. Timpul de uscare recomandat este de 5 minute la 132-135°C.

Garanție:

Aceste produse sunt garantate pentru defecte ale materialelor și manoperei pentru 90 de zile. Garanția se anulează dacă stricăciunea este rezultatul manipulării și utilizării neadecvate. Trebuie avută grijă în utilizarea și reprocessarea acestor produse.

ATENȚIE: Legea federală (SUA) restricționează vânzarea acestui dispozitiv doar de către sau la prescripția unui medic.



525 French Road Utica, New York 13502-5994 SUA
(315) 797-8375 Fax (315) 797-0321

Serviciul clienți (SUA) 1-800-448-6506

e-mail: info@conmed.com

<http://www.conmed.com>

© CONMED Corporation

Pentru solicitări sau comenzi internaționale
vă rugăm să contactați
Departamentul de Vânzări Internaționale CONMED
(315) 797-8375 • FAX (315) 735-6235
62-5856-001 REV.L