

○ Dezinfectarea suprafețelor delicate ale aparatelor medicale

zeta 3 wipes POP-UP

Parfum de mentă



APLICAȚII

ZETA 3 WIPES POP-UP sunt șervețele mari și compacte, îmbibate în soluție dezinfectantă și de curățare cu un conținut de alcool extrem de mic. Datorită rezistenței lor și compatibilității optime cu toate materialele, șervețelele **ZETA 3 WIPES POP-UP** sunt ideale chiar și pentru curățarea rapidă și dezinfectarea celor mai delicate suprafețe ale dispozitivelor medicale (tapiteria fotoliului dental, suprafețele din plexiglas, mobilier, etc.). Aranjamentul moale practic și resigilabil asigură o durată de viață mai îndelungată și în același timp ocupă puțin spațiu în sertar.

SPECTRU

Bactericid: EN 13697, EN 1276**, EN 14561**, EN 14561 (MRSA)

Fungicid: EN 13697 (A. niger), EN 14562 (A. fumigatus)

Levuricid: EN 1650**, EN 13624, EN 13697, EN 14562 (C. albicans)

Tuberculocid: EN 14348, EN 14563 (M. terrae)

Virulicid: EN 14476 (HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS, poliomavirus, H1N1, Rotavirus), EN 14476**(HSV)

În condiții curate

** În condiții murdare

INGREDIENTE ACTIVE

100 g de soluție dezinfectantă conțin:

- săruri cuaternare de amoniu
- alcool (< 3%)

Fiecare pachet de șervețele **ZETA 3 WIPES POP-UP** conține 100 de șervețele mari, testate dermatologic.

UTILIZARE

Îndepărtați sigiliul de siguranță și treceți șervețelul peste suprafața de dezinfectat și curățat. Lăsați să acționeze cel puțin 1 minut, fără a clăti. Închideți ermetic capacul.

RECOMANDĂRI

Evitați contactul cu pielea iritată, rănilor și membranele mucoase. Nu reutilizați șervețelul! Aceasta i-ar putea reduce eficiența și ar putea duce la contaminare încrucișată.

Zhermar
Dental