

2.1 Comenzile sistemului

Comenzile sistemului electronic al evacuatorului (evacuatoarelor) de fum chirurgical VisiClear™ sunt ușor de înțeles și simplu de utilizat. Pentru a porni aparatul, conectați cablul de alimentare furnizat la o priză cu împământare și capătul pentru aparat la partea din spate a sistemului de evacuare a fumului. După conectarea alimentării electrice, ecranul tactil al unității se va aprinde și va începe procesul de inițializare. Finalizarea acestuia va dura aproximativ 20 de secunde. În acest timp, pe ecranul tactil va apărea sigla Buffalo Filter, urmată de denumirea sistemului - VisiClear™.

NOTĂ: Vă rugăm să vă asigurați de faptul că ați citit în totalitate instrucțiunile înainte de instalarea accesoriilor sau utilizarea acestui echipament. În caz contrar, se poate produce deteriorarea unității și/sau vătămare personală.



Butonul „Afișaj pornit/oprit” situat pe partea frontală a panoului sistemului VisiClear™ va activa sau dezactiva panoul de comandă de tip ecran tactil, precum și orice funcție a unității. Alimentarea electrică a sistemului va fi menținută, cu excepția situației în care cablul de alimentare este deconectat.

MOD DE FUNCȚIONARE

După finalizarea procesului de inițializare, panoul de comandă de tip ecran tactil se va aprinde și va conține butoane pentru selectarea modului de funcționare. Opțiunile sunt: Tub deschis, Atașare creion electrochirurgical/Creion de evacuare a fumului integrat sau Tub laparoscopic. A se vedea Figura 1.



Figura 1.

Vă rugăm să selectați modul adecvat pentru aplicația dumneavoastră clinică. Sistemul VisiClear™ va ajusta automat durata de viață a filtrului pe baza debitului necesar pentru aceste aplicații.