



9
Scoateți lanțeta ținând mai întâi capul dispozitivului. Aruncați în siguranță lanțeta utilizată prin plasarea discului de protecție pe o suprafață dură și împingând vârful lanțetei în disc.

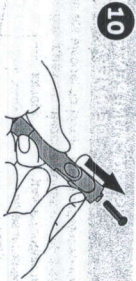

10
Gisați electrodul înainte pentru a elimina lanțeta utilizată. Aruncați lanțetele în conformitate cu reglementările locale.

Locurile Alternative pentru Testare (AST)

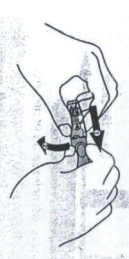

NOTA

- Aceasta opțiune nu este disponibilă pentru toate dispozitivele. Consultați Ghidul Utilizatorului sistemului dvs. pentru a afla dacă puteți efectua AST (testarea în locuri alternative).
- Nu aruncați capacul după fiecare utilizare.

Testarea în locuri altele decât vârful degetului este numită testare în locuri alternative (AST). Vă rugăm să citiți secțiunea Locuri Alternative pentru Testare din Ghidul Utilizatorului înainte de a efectua AST. Înlocuiți capacul dispozitivului de înțepare cu capacul curat pentru testarea în locuri alternative. Trageți înapoi de mânerul cu arc până se aude un click caracteristic. Alinați când înțepați antebrațul, brațul superior sau mâna, evitați zonele cu vene evidente, în scopul de a preveni sângerarea în exces.

Curățarea și dezinfectarea dispozitivului de înțepare și a capacului

Lanțetele sunt destinate doar pentru o singură utilizare. Dispozitivul de înțepare este reutilizabil. Pentru a curăța dispozitivul de înțepare și capacul, utilizați un săpun și apă pentru a șterge și a curăța dispozitivul de înțepare. **NU** clătiți dispozitivul sub apă.

Dezinfectați capacul prin plasarea acestuia în alcool 70%, timp de 10 minute și apoi lăsați-l să se usuce la aer. **NU** așezați dispozitivul într-o mașină de spălat vase sau nu utilizați detergenți.

ATENȚIE

1. În cazul în care rezultatul testului pentru sângele obținut de la locul de puncție nu se potrivește cu modul în care vă simțiți, contactați medicul specialist.
2. Înainte de a vă decide să utilizați sânge din alte locuri decât vârful degetului, consultați medicul specialist.
3. În cazul în care dispozitivul de înțepare este utilizat de o a doua persoană care oferă asistență de testare utilizatorului, dispozitivul de înțepare trebuie curățat și dezinfectat înainte de utilizare de către a doua persoană. A doua persoană trebuie să poarte mănuși de protecție pentru toate etapele atunci când oferă asistență pentru testare.
4. Păstrați întotdeauna dispozitivul de înțepare cu toate componentele sale și lanțetele departe de copii.
5. Folosiți doar modelul de lanțete TD-5084 pentru dispozitivul de înțepare TD-5010. Alte lanțete nu pot fi utilizate cu acest dispozitiv de înțepare.
6. Depozitați dispozitivul de înțepare neavând nici o lanțetă introdusă.
7. În cazul în care a avut loc un incident grav în legătură cu dispozitivul, acesta ar trebui raportat producătorului și autorității competente a statului în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Informații Simboluri

Semnificația Simbolului	Semnificația Simbolului
Consultați Instrucțiunile de utilizare	Atenție
Producător	Conformitate RoHS
Numărul Lotului	Dispozitiv medical
Marcajul CE pentru lanțete	Data producerii
Nu reutilizați (doar lanțete)	Marcajul CE pentru dispozitiv de înțepare
Valabil până la data de (doar lanțete)	Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană
Sterilizat prin iradiere (doar lanțete)	

Reprezentant autorizat în UE
Mediwin EC-REP GmbH
Borsstraße 10, 49163 Münster, Germany

Importator în România:
BIO LIFE SYSTEMS SRL
Str. Ion Scut 7 C.1
Craiova, jud. Drajova, 507055

Importator în Republica Moldova:
POSCADO SRL
Chisinau, str. N. Testemiracu 3/18,
MD-2025, Republic of Moldova
tel: 022-285.799, hotline 800.77.0.77

TaiDoc Technology Corporation
B1-7-75, No. 727, Wuping 2nd Rd.,
Wujiaojiao, 24088 New Taipei City, Taiwan
www.taiDoc.com

Model Nr. Lancetă Sterilă: TD-5084
Model Nr. Dispozitiv Înțepare: TD-5010

