



Mosaic P 6C/E1, Mosaic M 6C/E1

Ghid de utilizare

www.rexton.com

REXTON 

Cuprins

Bine ați venit	4
Instrumentele dumneavoastră auditive	5
Tip instrument	5
Familiarizarea cu instrumentele dumneavoastră auditive	5
Componente și nume	6
Comenzi	10
Setări	12
Baterii	14
Dimensiunea bateriei și sfaturi privind manipularea	14
Înlocuirea bateriilor	15
Reîncărcarea bateriilor reîncărcabile	16
Utilizare zilnică	17
Pornire și oprire	17
Introducerea și scoaterea instrumentelor auditive	18
Reglarea volumului	22
Schimbarea programului auditiv	23
Reglări suplimentare (opțional)	23

Situații de ascultare speciale	24
Setarea focalizării (opțional)	24
La telefon	26
Bucle de inducție audio	28
Intrare audio (sistem FM)	29
Întreținere și îngrijire	31
Instrumente auditive	31
Căști și tuburi	32
Întreținere profesională	35
Informații suplimentare	36
Informații privind siguranța	36
Funcționalitate wireless (fără fir)	36
Accesorii	36
Simboluri utilizate în acest document	37
Identificarea și soluționarea problemelor	37
Informații specifice fiecărei țări	38
Service și garanție	39

Bine ați venit

Vă mulțumim pentru alegerea instrumentelor noastre auditive, care vă vor însoți în viața de zi cu zi. Ca în cazul oricărui lucru nou, va fi necesar un anumit interval de timp să vă familiarizați cu acestea.

Acest ghid, împreună cu asistența oferită de audiologul dumneavoastră, vă va ajuta să înțelegeți avantajele și calitatea mult mai bună a vieții oferite de instrumentele dumneavoastră auditive.

Pentru a beneficia cât mai mult de instrumentele dumneavoastră auditive, se recomandă să le purtați zilnic, pe parcursul întregii zile. Acest ghid vă va ajuta să vă obișnuiți cu acestea.



ATENȚIE

Este important să citiți ghidul de utilizare și manualul de siguranță cu atenție și în întregime. Respectați informațiile de siguranță pentru a evita daunele sau rănirea.

Acest ghid al utilizatorului este valabil pentru:
Mosaic P 80/60/40 6C, Mosaic P 30/20 E1,
Mosaic M 80/60/40 6C, Mosaic M 30/20/10 E1,
Mosaic M NR 80/60/40 6C

Instrumentele dumneavoastră auditive



Acest ghid de utilizare descrie funcțiile opționale pe care instrumentele dumneavoastră auditive le pot avea sau nu.

Solicitați audiologului să indice funcțiile valide pentru instrumentele dumneavoastră auditive.

Tip instrument

Instrumentele dumneavoastră auditive sunt modele BTE (Behind-The-Ear (În spatele urechii)). Un tub furnizează sunetul de la instrumentul auditiv în ureche. Instrumentele nu sunt destinate copiilor cu vârsta sub 3 ani sau persoanelor cu o vârstă de dezvoltare sub 3 ani.

Familiarizarea cu instrumentele dumneavoastră auditive

Se recomandă să vă familiarizați cu noile instrumente auditive. Cu instrumentele în mână încercați să utilizați comenzile și să observați amplasarea acestora pe instrument. Acest lucru va simplifica sarcina de a simți și apăsa comenzile în timp ce purtați instrumentele auditive.



Dacă întâmpinați probleme la apăsarea butoanelor de comandă ale instrumentelor auditive în timp ce le purtați, consultați-vă cu audiologul dumneavoastră pentru a afla dacă este disponibilă o telecomandă sau o aplicație de smartphone pentru controlarea instrumentelor.

Componente și nume

Acest ghid de utilizare descrie diverse tipuri de instrumente auditive. Utilizați următoarele imagini pentru a identifica tipul de instrument auditiv pe care îl utilizați.

Instrumentele dumneavoastră auditive sunt atașate la un dispozitiv de fixare în ureche și o cască făcută la comandă sau la un tub standard (ThinTube) și o cască standard (Open Tip).

Mosaic M 6C, Mosaic M NR 6C, Mosaic M 30/20 E1



-
- | | |
|----------------------------------|---|
| ❶ Cască (Open Tip) | ❺ Orificii pentru microfon |
| ❷ Fir de reținere (opțional) | ❻ Întrerupător rectangular (control) |
| ❸ Tub (ThinTube) | ❼ Compartiment baterie (întrerupător de pornire/oprire) |
| ❹ Dispozitiv de fixare în ureche | ❽ Contacte de încărcare (opțional) |
-

Mosaic M 10 E1



-
- | | |
|------------------------------|---|
| 1 Cască (Open Tip) | 5 Dispozitiv de fixare în ureche |
| 2 Fir de reținere (opțional) | 6 Orificii pentru microfon |
| 3 Tub (ThinTube) | 7 Întrerupător rectangular (control) |
| 4 Adaptor pentru ThinTube | 8 Compartiment baterie (întrerupător de pornire/oprire) |
-

Mosaic P



-
- | | |
|---|---|
| 1 Cască (Open Tip) | 5 Orificii pentru microfon |
| 2 Fir de reținere (opțional) | 6 Întrerupător rectangular (control) |
| 3 Tub (ThinTube) | 7 Compartiment pentru baterii (întrerupător de pornire/oprire) |
| 4 Dispozitiv de fixare în ureche | |
-

Puteți utiliza căști standard împreună cu un tub standard sau căști făcute la comandă împreună cu un dispozitiv de fixare în ureche și tub.

Puteți schimba cu ușurință căștile standard și curăța la fel de ușor tubul standard. Citiți mai multe în secțiunea „Întreținere și îngrijire”.

Căști/tuburi standard	Dimensiune
☐ 	Open Tip deschiș sau închis
☐ 	Open Tip semi-deschiș
☐ 	Open Tip dublu
☐ ThinTube	


Căști făcute la comandă

☐ Exemple:



Comenzi

Cu ajutorul întrerupătorului rectangular, puteți, de exemplu, regla volumul sau comuta programele auditive. Audiologul dumneavoastră a programat funcțiile dorite de dumneavoastră pe întrerupătorul rectangular.

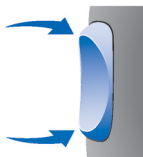

Puteți utiliza, de asemenea, o telecomandă sau o aplicație pe smartphone pentru a vă controla instrumentele auditive.

Funcția întrerupătorului rectangular	L	R
Apăsați scurt:		
Program sus/jos	☐	☐
Mărire/micșorare volum	☐	☐
Funcția Tinnitus (Acufene): mărire/micșorare volum	☐	☐
Balans de sunet	☐	☐
Selectarea focarului (microfon-ajustare șablon)	☐	☐
Mixer de sunet (intrare audio)	☐	☐
Apăsați lung:		
Standby/pornire	☐	☐
Program sus/jos	☐	☐
Apăsați foarte lung:		
Standby/pornire	☐	☐

L = Stânga, R = Dreapta

Setări

Programe auditive

1

2

3

4

5

6

Citiți mai multe în secțiunea
„Schimbarea programului auditiv”.

Funcții



Funcția de pornire cu întârziere permite introducerea fără țiuit a instrumentelor auditive.

Citiți mai multe în secțiunea „Pornire și oprire”.



Autophone™ comută automat la programul telefonic atunci când țineți receptorul telefonului aproape de ureche.

Citiți mai multe în secțiunea „La telefon”.



XPhone transmite apelul telefonic în ambele urechi atunci când receptorul telefonului este ținut la una dintre urechi.

Citiți mai multe în secțiunea „La telefon”.

- ☐ **Funcția de tinitus** generează un sunet pentru a vă distra atenția de la tinitusul dumneavoastră.
- ☐ Pentru a reîncărca bateriile din instrumentele auditive cu **contactele de încărcare**, trebuie doar să amplasați instrumentele în încărcător. După încărcare, încărcătorul va dezumidifica instrumentele auditive.
- ☐ Funcționalitatea **wireless** permite comanda simultană a ambelor instrumente auditive.
Citiți mai multe în secțiunea „Funcționalitate wireless (fără fir)”.

Baterii

Când capacitatea bateriei este redusă, sunetul devine mai slab sau veți auzi un semnal de alarmă. Tipul bateriei determină durata de utilizare a acesteia înainte de fi înlocuită sau reîncărcată.

Dimensiunea bateriei și sfaturi privind manipularea

Consultați audiologul pentru bateriile recomandate.

Dimensiune baterie:	13
---------------------	----

- Utilizați întotdeauna dimensiunea de baterie corectă pentru instrumentele dumneavoastră auditive.
- Scoateți bateriile dacă nu veți utiliza instrumentele auditive în decurs de câteva zile.
- Luați întotdeauna la dumneavoastră baterii de rezervă.
- Înlocuiți imediat bateriile descărcate și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale privind reciclarea.

Înlocuirea bateriilor

Scoaterea bateriei:

- Deschideți compartimentul pentru baterii.



- Utilizați bagheta magnetică pentru a scoate bateria. Bagheta magnetică este disponibilă ca accesoriu.



Introducerea bateriei:

- Dacă bateria are o folie de protecție, îndepărtați-o doar când sunteți pregătit/ă să utilizați bateria.
- Introduceți bateria cu simbolul „+” orientat în sus. (consultați imaginea).



- Închideți cu atenție compartimentul pentru baterii. Dacă simțiți rezistență, bateria nu este introdusă corect.

Nu încercați să închideți compartimentul pentru baterii cu forță. Se poate deteriora.

Reîncărcarea bateriilor reîncărcabile

Încărcați bateriile reîncărcabile înainte de prima utilizare.

- Pentru a încărca bateriile, urmați instrucțiunile din ghidul de utilizare a încărcătorului.

După mai multe cicluri de reîncărcare, durata de viață a bateriei se poate reduce. În acest caz, înlocuiți bateria reîncărcabilă cu una nouă. Pentru a face acest lucru, urmați instrucțiunile pentru înlocuirea bateriilor.

Utilizare zilnică

Pornire și oprire

Aveți următoarele opțiuni de pornire și oprire a instrumentelor dumneavoastră auditive.

De la compartimentul bateriei:

- ▶ Pornire: Închideți compartimentul pentru baterii.
Sunt setate volumul și programul auditiv **implicite**.
- ▶ Opre: Deschideți compartimentul bateriei până la primul limitator.

De la întrerupătorul rectangular:

- ▶ Pornire sau oprire: Apăsați și țineți apăsat întrerupătorul rectangular pentru câteva secunde. Consultați secțiunea „Comenzi” pentru setările întrerupătorului rectangular.
După pornire, volumul și programul auditiv utilizate **anterior** rămân setate.

Atunci când purtați instrumentele auditive, un ton de alertă poate indica pornirea sau oprirea unui instrument.

Când este activată **funcția de pornire cu întârziere**, instrumentele auditive pornesc după o întârziere de câteva secunde. În acest timp, puteți introduce instrumentele auditive în urechi fără a experimenta un țuit de feedback neplăcut.

„Funcția de pornire cu întârziere” poate fi activată de audiologul dumneavoastră.

Introducerea și scoaterea instrumentelor auditive

Instrumentele dumneavoastră auditive au fost reglate cu precizie pentru urechea dreaptă și urechea stângă. Marcatoarele colorate indică partea:

- marcator roșu = urechea dreaptă
- marcator albastru = urechea stângă



Mosaic P, Mosaic M 6C,
Mosaic M NR 6C,
Mosaic M 30/20 E1




Mosaic M 10 E1

Introducerea unui instrument auditiv:

- ▶ Țineți tubul aproape de cască.
- ▶ Împingeți cu grijă casca în canalul urechii ❶.
- ▶ Răsuciți-o ușor până când se fixează bine.

Deschideți și închideți gura pentru a evita acumularea de aer în canalul urechii.

- ▶ Ridicați instrumentul auditiv și glisați-l peste partea de sus a urechii ❷.

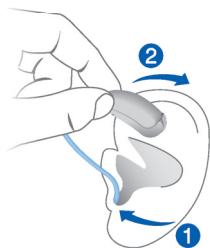

ATENȚIE

Risc de rănire!

- ▶ Introduceți componenta pentru ureche cu atenție și nu prea adânc în ureche.



- Poate fi util să introduceți instrumentul auditiv din **dreapta** cu mâna **dreaptă** și instrumentul auditiv din **stânga** cu mâna **stângă**.
- Dacă aveți probleme la introducerea căștii, utilizați cealaltă mână pentru a trage ușor de lobul urechii în jos. Astfel, canalul urechii se deschide și casca este introdusă cu ușurință.


Firul opțional de fixare ajută la fixarea sigură a căștii în ureche. Pentru a poziționa firul de fixare:

- ▶ Îndoțiți firul de fixare și poziționați-l cu atenție în baza cavității urechii. (consultați imaginea).



Scoaterea unui instrument auditiv:

- ▶ Ridicați instrumentul auditiv și glisați-l peste partea de sus a urechii ①.
- ▶ Țineți tubul aproape de cască și trageți casca afară cu atenție ②.

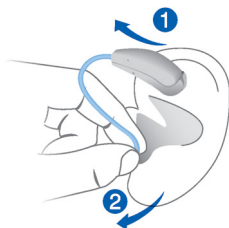

ATENȚIE

Risc de rănire!

- ▶ În cazuri foarte rare, componenta pentru ureche poate rămâne în urechea dumneavoastră atunci când scoateți instrumentul auditiv. Într-un astfel de caz, apălați la un medic pentru scoaterea componentei pentru ureche.

Curățați-vă și uscați-vă instrumentele auditive după utilizare. Citiți mai multe în secțiunea „Întreținere și îngrijire”.

Reglarea volumului

Instrumentele dumneavoastră auditive reglează automat volumul în funcție de situația de ascultare.

- ▶ Dacă preferați ajustarea manuală a volumului, apăsați întrerupătorul rectangular.

Consultați secțiunea „Comenzi” pentru setările întrerupătorului rectangular.

Un ton de semnal opțional poate indica schimbarea volumului. După atingerea volumului maxim sau minim, puteți auzi un ton de semnal opțional.

Schimbarea programului auditiv

În funcție de situația de ascultare, instrumentele dumneavoastră auditive își reglează automat sunetul.

Instrumentele auditive pot avea, de asemenea, mai multe programe auditive care vă permit să schimbați sunetul, dacă este necesar. Un ton de semnal opțional poate indica schimbarea programului.

- Pentru a schimba programul auditiv, apăsați întrerupătorul rectangular.

Consultați secțiunea „Comenzi” pentru setările întrerupătorului rectangular. Consultați secțiunea „Setări” pentru o listă a programelor auditive.



Dacă este activată funcția Autophone sau XPhone, programul auditiv comută automat la un program telefonic când receptorul telefonului este aproape de ureche.

Citiți mai multe în secțiunea „La telefon”.

Reglări suplimentare (opțional)

De asemenea, comenzile instrumentelor dumneavoastră auditive pot fi utilizate pentru a schimba, de exemplu, balansul de sunet sau volumul funcției de tinitus.

Balansul de sunet vă permite să ajustați sunetele de joasă frecvență și sunetele de înaltă frecvență în funcție de preferințele dumneavoastră.

Consultați secțiunea „Comenzi” pentru setările comenzilor.

Situații de ascultare speciale

Setarea focalizării (opțional)

Dacă doriți să vă focalizați mai mult direct pe partenerul de conversație aflat în fața dumneavoastră sau dacă doriți să ascultați un mediu mai larg - funcția de ajustare șablon a microfonului vă oferă control asupra preferințelor de ascultare.

Puteți selecta niveluri diferite – de la „focus to frontal position” (focalizare în poziție frontală) (imaginea din stânga) la „middle position” (poziția din mijloc) (imagine centrală) „hear all around” (auziți toate sunetele din jur) (imaginea din dreapta).



Condiții preliminare:

- Trebuie să purtați două instrumente auditive.
- Pe unul dintre instrumentele auditive, întrerupătorul rectangular trebuie setat pentru reglarea microfonului de către audiologul dumneavoastră.

Consultați secțiunea „Comenzi” pentru setările întrerupătorului rectangular.

Cu o telecomandă adecvată și o aplicație de smartphone, aveți și mai multe opțiuni de control.

Setarea focalizării manual:

- ▶ Dacă aveți mai multe programe auditive, schimbați la programul auditiv 1.
- ▶ Apăsați întrerupătorul rectangular setat pentru această funcție.

Nivelul mediu este activ în mod implicit.

- ▶ Apăsați întrerupătorul rectangular superior pentru focalizare mai mare în față sau întrerupătorul rectangular inferior pentru a asculta un mediu mai larg.

Ieșirea din modul de ajustare șablon a microfonului:

- ▶ Comutați la nivelul minim sau maxim.

Un ton de semnal opțional poate indica nivelul minim sau maxim.

- ▶ Comutați încă un pas.

Același ton de semnal ca pentru schimbarea programului auditiv este redat, indicând faptul că ați ieșit din modul de ajustare șablon a microfonului.

La telefon

Când vorbiți la telefon, țineți receptorul telefonului ușor deasupra urechii. Instrumentul auditiv și receptorul telefonului trebuie să fie aliniate. Întoarceți ușor receptorul astfel încât urechea să nu fie complet acoperită.



Program telefonic

Puteți prefera un anumit volum când utilizați telefonul. Solicitați audiologului dumneavoastră să configureze un program telefonic.

- Comutați la programul telefonic de fiecare dată când vorbiți la telefon sau utilizați comutatorul automat de programe.

Secțiunea „Setări” listează dacă un program telefonic sau un comutator automat de programe este configurat pentru instrumentele dumneavoastră auditive.

Comutator automat de programe (Autophone sau XPhone)

Instrumentul dumneavoastră auditiv poate selecta **automat** programul telefonic atunci când aduceți receptorul telefonului aproape de instrumentul auditiv. XPhone poate chiar transmite apelul în ambele urechi. Când ați terminat de vorbit la telefon, îndepărtați receptorul de instrumentul auditiv, iar modul de microfon va fi resetat.

Dacă doriți să utilizați această funcție, solicitați audiologului dumneavoastră următoarele:

- Activarea funcției Autophone sau XPhone.
- Verificarea câmpului magnetic al receptorului telefonului.

Pentru comutarea automată a programelor, instrumentul dumneavoastră auditiv detectează câmpul magnetic al receptorului telefonului. Nu toate telefoanele produc un câmp magnetic suficient de puternic pentru a activa funcția. În acest caz, puteți utiliza magnetul Autophone, disponibil ca accesoriu, și atașați-l la receptorul telefonului.

Consultați ghidul utilizatorului magnetului Autophone pentru instrucțiuni privind modul de poziționare a magnetului.



NOTĂ

Utilizați doar magnetul Autophone aprobat. Solicitați audiologului dumneavoastră acest accesoriu.

Bucle de inducție audio

Unele telefoane și locuri publice precum teatre oferă semnal audio (muzică și vorbire) prin intermediul buclei de inducție audio. Cu acest sistem, instrumentele dumneavoastră auditive pot primi direct semnalul dorit – fără zgomotul din mediu.

De obicei, puteți recunoaște sistemele cu buclă de inducție audio după anumite simboluri.



Solicitați audiologului dumneavoastră să configureze un program de telebobină.

- Comutați la programul de telebobină de fiecare dată când vă aflați într-o locație cu buclă de inducție audio.

Secțiunea „Setări” listează dacă un program de telebobină este configurat pentru instrumentul dumneavoastră auditiv.

Program de telebobină și telecomandă



NOTĂ

Pentru instrumente cu conectivitate wireless:
Când programul de telebobină este activ,
telecomanda poate cauza un zgomot pulsator.

- Utilizați telecomanda la o distanță mai mare de 10 cm (4 inchi).

Intrare audio (sistem FM)

Cu o intrare audio, vă puteți conecta instrumentele auditive la un sistem FM. Un sistem FM constă dintr-un transmițător și un receptor. Captează sunetele de vorbire la sursa de vorbire (prin intermediul unui microfon separat) și transmite sunetul direct la instrumentele auditive.

Semnalul este mai clar și neafectat de acustica slabă a camerei. Acest lucru poate fi util pentru adulții aflați în situații în care ascultarea este dificilă și pentru copii aflați în săli de clasă.

Majoritatea sistemelor FM permit cuplarea cu dispozitive audio precum un MP3 player.

Note:

- Compartimentul pentru baterie cu intrare audio este disponibil ca accesoriu doar pentru anumite tipuri de instrumente.

Ca alternativă, puteți utiliza un dispozitiv de flux de date (streaming) audio cu o fișă pentru receptoare FM. Consultați audiologul dumneavoastră pentru informații suplimentare.

- Solicitați audiologului dumneavoastră să configureze instrumentele auditive, de exemplu:
 - Să regleze combinația dintre semnalul intrării audio cu sunetele din jur.
 - Să configureze comenzile, astfel încât să puteți selecta între doar semnalul de intrare audio, doar sunetele înconjurătoare sau o combinație a acestora.



AVERTISMENT

Risc de șoc electric!

- ▶ Conectați intrarea audio doar la un dispozitiv care respectă IEC 60065, Norma IEC pentru dispozitive audio, video și alte dispozitive electronice.

Întreținere și îngrijire

Pentru prevenirea deteriorărilor, este important să aveți grijă de instrumentele dumneavoastră și să respectați câteva reguli de bază, care vor deveni în curând parte a rutinei dumneavoastră zilnice.

Instrumente auditive

Uscarea și depozitarea

- ▶ Uscăți-vă instrumentele auditive peste noapte.
- ▶ Solicitați audiologului dumneavoastră produsele de uscare recomandate.
- ▶ În timpul perioadelor lungi de neutilizare, depozitați-vă instrumentele auditive cu compartimentul bateriei deschis și bateriile scoase într-un sistem de uscare pentru a preveni efectele adverse produse de umezeală.

Curățare

Instrumentele dumneavoastră auditive au un strat de protecție. Totuși, dacă acestea nu sunt curățate cu regularitate, se pot defecta sau pot cauza răniuri personale.

- ▶ Curățați-vă instrumentele auditive zilnic folosind un șervețel moale și uscat.
- ▶ Nu utilizați niciodată jet de apă sau nu introduceți dispozitivele în apă.
- ▶ Nu aplicați niciodată presiune în timpul curățării.



- Solicitați audiologului dumneavoastră produse de curățare recomandate, seturi speciale de îngrijire sau informații suplimentare privind modul de păstrare a instrumentelor dumneavoastră auditive în bună stare.

Căști și tuburi

Cerumenul (ceara din urechi) se poate acumula pe căști. Acest lucru poate afecta calitatea sunetului.

- Pentru instrumente auditive cu un tub standard (ThinTube):

Cuățați căștile zilnic și curățați tuburile după cum este necesar.

Schimbați căștile și tuburile aproximativ la fiecare trei - șase luni sau mai devreme dacă observați fisuri isau alte modificări.

- Pentru instrumente auditive cu dispozitiv de fixare în ureche:


Curățați zilnic căștile.

Solicitați audiologului dumneavoastră să curețe tuburile sau să schimbe căștile și tuburile după cum este necesar.

Curățarea elementelor care intră în ureche

- Curățați casca după scoatere cu un tampon moale și uscat.

Acest lucru va împiedica uscarea și întărirea cerumenului.

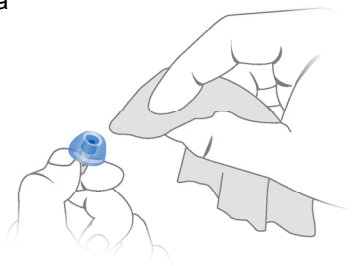


- Nu utilizați niciodată jet de apă sau nu introduceți casca în apă.

Curățarea tuburilor standard

Nu utilizați niciodată jet de apă și nu introduceți tubul în apă.

Puteți curăța tuburile standard (ThinTube) utilizând o sârmă specială de curățare. Solicitați audiologului dumneavoastră sârme de curățare adecvate.


- ▶ Îndepărtați tubul și adaptorul deșurubând adaptorul de pe instrumentul auditiv.
- ▶ Introduceți cu atenție instrumentul din sârmă pentru curățare în adaptor **1**.
- ▶ Împingeți sârma specială de curățare până la capătul tubului **2**.

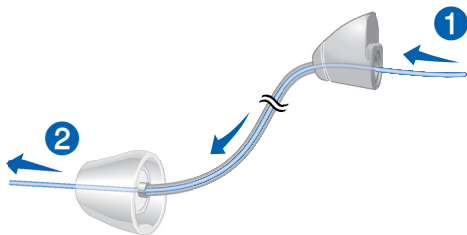

- ▶ Îndepărtați orice urmă de cerumen sau reziduuri care se desprind.
- ▶ Scoateți complet sârma specială de curățare.
- ▶ Reatașați tubul și adaptorul la instrumentul auditiv.


Schimbarea căștilor standard (Open Tip)

- Scoateți casca utilizată și conectați noua cască.

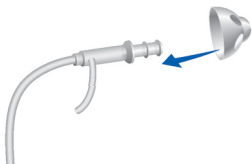

Schimbarea tuburilor standard (ThinTube)

- Deșurubați tubul utilizat și înșurubați noul tub.

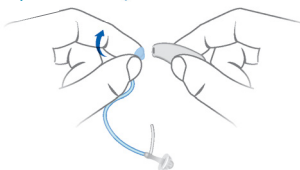

Întreținere profesională

Audiologul dumneavoastră poate efectua întreținerea și curățarea completă profesională a instrumentului.

Căștile și filtrele de ceară particularizate trebuie schimbate atunci când este necesar de către un audiolog.

Solicitați audiologului dumneavoastră recomandări individuale privind intervalele de întreținere, precum și asistență.

Informații suplimentare

Informații privind siguranța

Pentru mai multe informații, consultați manualul de siguranță furnizat cu dispozitivul.

Funcționalitate wireless (fără fir)

Instrumentele dumneavoastră auditive sunt prevăzute cu funcționalitate wireless (fără fir). Aceasta asigură sincronizare între cele două instrumente auditive:

- Dacă modificați volumul sau programul unui instrument, modificările vor fi efectuate automat și la celălalt.
- Ambele instrumente auditive se vor adapta automat și simultan la situația de ascultare.

Funcționalitatea wireless (fără fir) permite utilizarea unei telecomenzi.

Accesorii

Tipul accesoriilor disponibile depinde de tipul instrumentului. Exemplele sunt: o telecomandă, un dispozitiv de flux de date (streaming) audio, sau o aplicație de smartphone pentru telecomandă.

Unele tipuri de instrumente auditive acceptă soluții CROS și BiCROS pentru persoane cu surditate pe o singură parte.

Consultați audiologul dumneavoastră pentru informații suplimentare.

Simboluri utilizate în acest document



Indică o situație care ar putea duce la accidentări grave, moderate sau minore.



Indică posibile daune materiale.



Recomandări și sfaturi despre o mai bună manipulare a dispozitivului dumneavoastră.

Identificarea și soluționarea problemelor

Problema și posibilele soluții

Sunetul este slab.

- Măriți volumul.
- Înlocuiți sau reîncărcați bateria descărcată (în funcție de tipul bateriei).
- Curățați sau înlocuiți tubul și casca.

Instrumentul auditiv emite un sunet fluierat.

- Reintroduceți casca până la fixarea sigură a acesteia.
- Micșorați volumul.
- Curățați sau înlocuiți casca.

Sunetul este distorsionat.

- Micșorați volumul.
- Înlocuiți sau reîncărcați bateria descărcată (în funcție de tipul bateriei).
- Curățați sau înlocuiți tubul și casca.

Problema și posibilele soluții

Instrumentul auditiv emite tonuri de semnal.

- Înlocuiți sau reîncărcați bateria descărcată (în funcție de tipul bateriei).

Instrumentul auditiv nu funcționează.

- Porniți instrumentul auditiv.
- Închideți complet compartimentul bateriei, cu atenție.
- Înlocuiți sau reîncărcați bateria descărcată (în funcție de tipul bateriei).
- Asigurați-vă că bateria este introdusă corect.
- Funcția de pornire cu întârziere este activă. Așteptați câteva secunde și verificați din nou.

Consultați-vă audiologul dacă întâmpinați alte probleme.

Informații specifice fiecărei țări

Service și garanție

Numere de serie

Stânga:

Dreapta:

Date de service

1:

4:

2:

5:

3:

6:

Garanție

Data achiziționării:

Perioadă de garanție în luni:

Audiologul dumneavoastră



Producător Legal

Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germania
Telefon +49 9131 308 0

Document No. 02994-99T03-3B00 RO

Order/Item No. 109 407 35

Master Rev04, 11.2017

© 01.2018, Sivantos GmbH. All rights reserved

www.rexton.com

CE
0123

REXTON 